

## NUMAX-PATENT-URINAL

INH. S.+ B. Ammon ° Bäumlisackerweg 17 ° CH-3274 Merzligen ° Tel / Fax +41 (0)32 323 16 01  
[www.inkontinenz-schweiz.ch](http://www.inkontinenz-schweiz.ch) / [www.numax.ch](http://www.numax.ch) / E/Mail [numax@numax.ch](mailto:numax@numax.ch)


NUMAX PATENT URINAL

Swiss made

Männer Urinal

Best.Nr. M-01-00.1



1

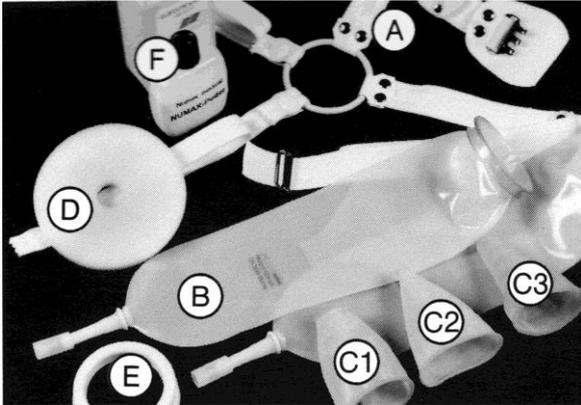

### Set- Inhalt :



- A Verstellbare Hüft-Bandage (inklusive montierte Bein-Bandage)
- B Beutel
- C1 Manschette Gr.2
- C2 Universal Manschette
- C3 Stufen Manschette
- D Polsterring
- E Numax-Pflegeset

### 1.Schritt : Einstellen der Länge der Hüft-Bandage

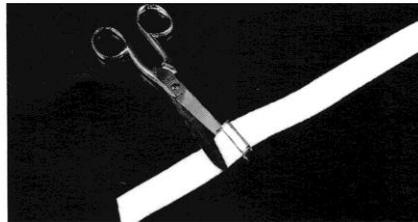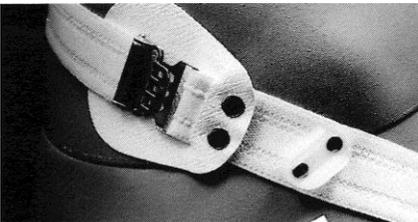


Hüft-Bandage ohne Beutel umschnallen. Mit der verstellbaren Schnalle eine angenehme Weite einstellen. Ueberstehendes Elastic-Band direct bei der Schnalle mit der Schere abschneiden

### 2.Schritt : Einstellen der Länge der Bein-Bandage

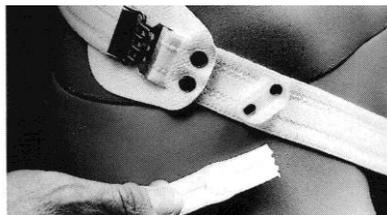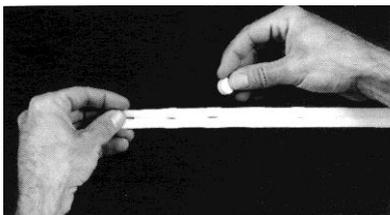

Die Doppelknöpfe können mit Knopfloch-band an der gewünschten Stelle eingehakt werden. Doppelknopf in den speziellen Knopfhalter an der Hüft-Bandage einhängen. Ueberstehendes Knopflochband mit der Schere schräg abschneiden. Bandage ausziehen.

### 3.Schritt : Manschette vorbereiten

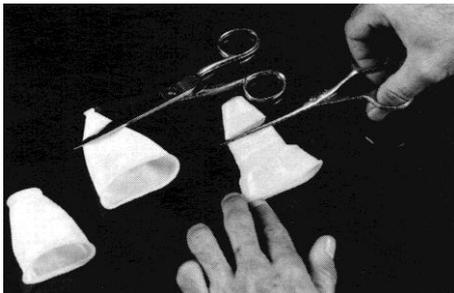


Dem Set liegen verschiedene Manschetten-Typen bei. Die Manichette wird später mit dem Beutel verbunden. Es ist wichtig, jetzt zu bestimmen, ob sie passt. D.h. sie sollte am Penis gut anliegen, ohne ihn einzuschnüren. Eventuell passt die im Set enthaltene Manichette Gr.2 (auch in den Grössen 1-8 erhältlich) falls nicht, so verwenden Sie die Universal-Manschette oder die Stufen-Manschette. Diese müssen jedoch von ihnen mit einer Schere auf die passende Oeffnungsweite geschnitten werden. Ob sie die Universal-oder die Stufen-Manschette verwenden, spielt keine Rolle, wichtig ist, dass sie gut sitzt, und Sie sich wohl fühlen.

### 4.Schritt : Manschette montieren





Beutel-Oberteil pudern. Die Manschette gleichmässig auf den Traging des Beutels aufziehen.

## 5.Schritt : Hüft-Bandage und Beutel miteinander verbinden

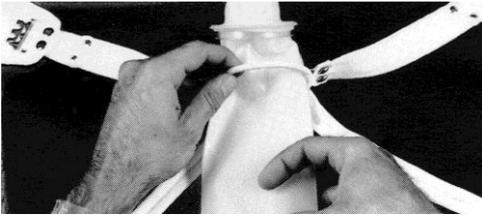


Den Beutel (inklusive der montierten Manschette) von hinten in den Gummiring der Hüft-Bandage ziehen.

## 6.Schritt : Anziehen

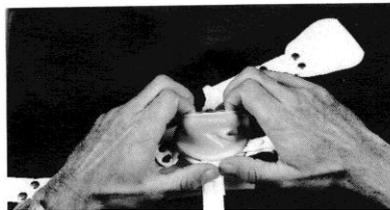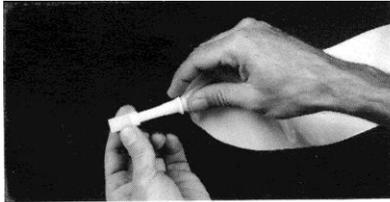

Penis pudern, um ein müheloses Einführen zu ermöglichen. Entleerungsventil öffnen. Dazu Auslaufhülse nach vorne ziehen. Den Polsterring direkt über den Penis ziehen, so erreichen Sie maximalen Tragkomfort. Manschette etwas auseinanderziehen und über den Penis stülpen. Kontrollieren Sie, ob die Manschette gut sitzt. Die durch das Anziehen miteingeschlossene Luft aus dem Beutel drücken. Entleerungsventil schliessen. Das fertig montierte Urinal mit Hüft-und Beinbandage umschnallen.

## Der Verbindungsring

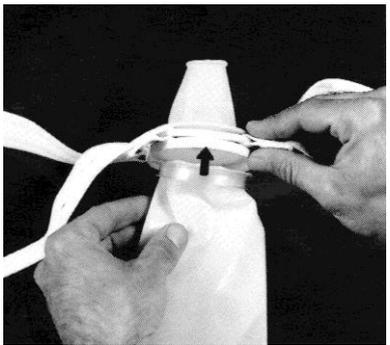

Das Männer Urinal hat sich auch ohne diesen Verbindungsring bestens Bewährt. Es ist deshalb nicht unbedingt notwendig, ihn zu verwenden. Für pflegebedürftige Patienten bedeutet er aber eine grosse Erleichterung. Der Verbindungsringermöglicht, dass der Beutel zum Waschen einfach ausgehängt werden kann. Die Bandage und die Manschette müssen nicht entfernt werden. Im **4.Schritt** die Manschette auf den Verbindungsring aufziehen. Den Polsterring direkt über den Penis ziehen, so erreichen Sie maximalen Tragkomfort. Verbindungsring (inklusive montierte Manschette) in den Gummiring der Hüft-Bandage eindrücken. Manschette etwas auseinanderziehen und über den Penis stülpen. Bandage umschnallen und erst jetzt den Beutel, mit geöffnetem Entleerungsventil (damit die eingeschlossene Luft entweicht), im Verbindungsring einrasten.**Entleerungsventil schliessen**. Das fertig montierte Urinal mit Hüft- und Beinbandage umschnallen.

## PFLEGE :

Für die Reinigung und Pflege des NUMAX PATENT URINAL SYSTEMS empfehlen wir Ihnen **EBOLIN-Spezial**. Diese Flüssigseife ( die Flasche enthält 250ml) wurde speziell für NUMAXmedical entwickelt. In 40 Grad warmem Wasser und etwas ELBOLIN-Spezial können sämtliche Bestandteile gewaschen werden.

**ACHTUNG** : Das Entleerungsventil muss während des Waschens geöffnet sein !

### WICHTIG :

**Die Kunststoff-Bestandteile des NUMAX Systems dürfen nie in zu heissem Wasser gespült werden !** Die optimale Verarbeitung der erstklassigen Materialien bietet Ihnen lange Sicherheit. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir Ihnen, den Beutel nach ca. Einmonatigem Gebrauch zu ersetzen. Manschetten sind nach Bedarf zu wechseln.

## Verbrauchs-und Ersatzteile

## Bitte das Bestell-Formular verwenden

Bestell-Nr.	Artikel
M-04-00.1	Beutel
M-05-09.1 bis 8	Manschette (je nach Grösse)
M-05-09-00	Stufen-Manschette
M-05-09.0	Universal-Manschette
M-08-11.1	Verbindungsring
M-07-05.1	Polsterring
M-03-00.1	Hüftbandage komplett
M-13-00.1	Bein-Bandage
M-33-00.1	NUMAX-Pflegeset (Elbolin Spezial und Numax Puder)
G-06-00.1	ELBOLIN-Spezial 250ml
G-07-00.1	NUMAX-Puder