

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 01.03.2018

Die Ausblasvorrichtung WL-Blow mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von WL-clean/ WL-cid* (Reinigung/ Desinfektion*) an Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten. WL-Blow dient ausschließlich der Anwendung im Aufbereitungsraum und kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage angeschlossen** werden!

- *trocknend*
- *reinigungsunterstützend*

Anwendungsgebiet

Entfernen von Reinigungs-/Desinfektions- und Pflegemittelrückständen in Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.

Anwendung

Nach der Anwendung mit WL-clean/WL-cid für 3 Sekunden anwenden, danach ist nach Herstellervorgaben zu pflegen/ölen. Vorgang ggf. wiederholen.

Anwendung nur durch Fachpersonal.

Lieferformen

| | |
|----------|---|
| REF 4160 | WL-Blow Set bestehend aus: 1 x Druckluftpistole (blau) 1 x Schlauchnippel G ¼" für Druckschlauch, PE 8x6x1 mm 2 x Luftmengenbegrenzer |
| REF 4162 | Luftmengenbegrenzer |
| REF 4144 | WL-Blow StarterSet 2 x WL-clean 2 x WL-cid 1 x WL-Blow 1 x Gebrauchsanweisung |

*Bitte Herstellerfreigaben beachten!

** Es wird der Anschluss eines Bakterienfilters empfohlen!

