


Japanischer Trainingsnuggi gross mit Lochsystem

welcher das Stillen an der Brust unterstützt

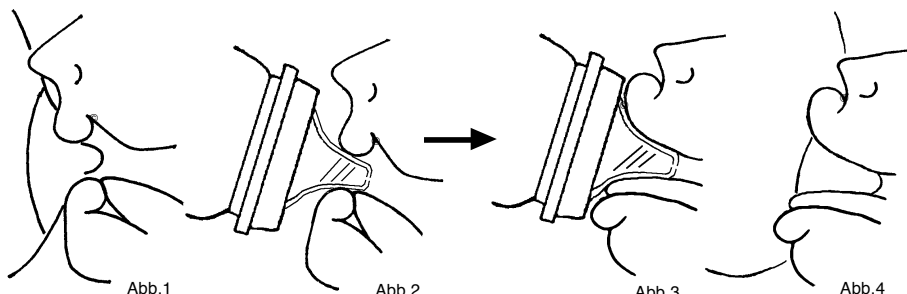

Unkorrekte Saugtechnik an der Brust oder aus der Flasche (Abb.1,2)
Der Mund ist nicht genug geöffnet, die Lippen sind nach innen gerollt, die Zunge bleibt hinten.

Training (Abb.3)
Das Baby saugt mit dem Trainingsnuggi gleich wie an der Brust.

Korrekte Saugtechnik (Abb.4)
Das Baby fasst die Brustwarze bis auf den Warzenhof und saugt fest hinein.

Ziele :

- Das Baby wird trainiert, den Mund noch weiter zu öffnen, noch tiefer anzufassen, aber nicht mit den eingerollten Lippen und den Pilgern die Brustwarze einzuklemmen.
- Beim Trinken die Lippen nach aussen zu rollen, um die Brustwarze richtig zu fassen. (Rollen Sie die Baby Lippen mit dem Finger nach aussen und führen Sie die beiden Lippen möglichst bis zum Saugerhalter).
- Beim Trinken den Mund weit zu öffnen und den Mundwinkel dicht zu fixieren. Somit ist die Vakuumkraft effektiver und es schluckt nicht viel Luft.

Indikation :

- Babys, die zum Trinken nicht Kraft haben, sehr schwach und /oder klein sind.
- Problematische Saugtechnik; wegen ungenügend vorgestreckter Zungenposition, falscher Lippenstellung, schwacher Saugkraft und schwacher Fixierung der Lippen und/oder - des Mundwinkels (das Baby macht den Mund nicht richtig zu.)

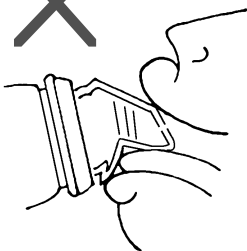


Abb.5 Falsche Führungsrichtung

Achtung !

- Die Lippen des Babys müssen immer korrigiert werden, lassen Sie sie niemals einklemmen, führen Sie sie möglichst bis zum Nuggihalter, wenn es das Trinken beginnt. Ohne diese Korrekturen trinkt das Baby nicht besser.
- Den Nuggi darf man nicht geknickt geben, sonst kann das Baby seinen Mundwinkel nicht dicht fixieren(➔ Abb.5)
- Der Sauger sollte mit dem Saugerhalter weder zu stark noch zu schwach aufgeschraubt werden.
- Der Nuggi passt am besten auf die Flasche von MAM, Migros Weithalsflasche oder Chicco Weithalsflasche.
- Wenn das Baby kürzer als 10 Minuten braucht, um die gesamte Menge zu trinken, sollten Sie mit einem anderen strengeren Sauger wechseln.
- Die Entlüftungsöffnung (Kerbe am Saugerrand) muss beim Schöpfeln oben sein.
- Für Spülmaschinen oder Mikrowelle ist der Sauger nicht geeignet.