

GoodKnight™ H₂O

BEHEIZTER ATEMLUFTBEFEUCHTER




- Effektive Anfeuchtung für die gesamte Nacht
- Einfach in Handhabung
- Leicht zu reinigen

Steigert Komfort und Compliance der CPAP-Therapie

Für Patienten, die unter Austrocknung der oberen Atemwege leiden, bietet Tyco Healthcare Erleichterung: Den beheizten Atemluftbefeuchter *GoodKnight H₂O*.

Der Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O* ist zum Gebrauch mit der *GoodKnight*-Familie entwickelt. Er steigert die Feuchtigkeit der Atemluft und vermindert oder beseitigt Trockenheit in Nase und Rachen. Durch die Verbesserung des Komforts hilft er die Akzeptanz gegenüber der CPAP-Therapie zu verbessern und die Compliance zu erhöhen.

Geringe Standfläche und das kompakte Gehäuse machen die Kombination aus *GoodKnight* Therapiegeräten und Befeuchter zu einer der kleinsten und leichtesten Lösungen im Markt.

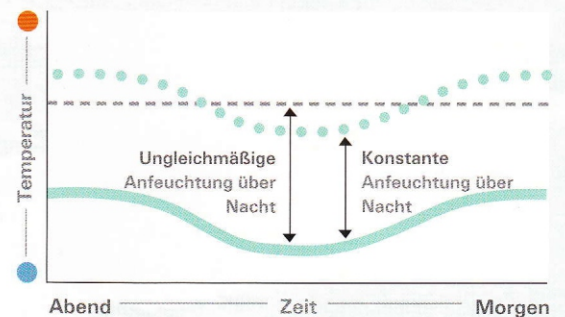

HumidControl

Das Humid Control-Konzept sichert eine gleich bleibende Temperaturdifferenz zwischen Wasser in der Befeuchterkammer und Umgebungsluft. Der Grad der Befeuchtung bleibt konstant. Wasserkondensation im Schlauchsystem wird minimiert.

Raumtemperatur ———
GoodKnight H₂O ●●●●●
Luftbefeuchter — — — — —
mit konstanter Temperatur

tyco
Healthcare

Puritan Bennett

GoodKnight H₂O

BEHEIZTER ATEMLUFTBEFEUCHTER

Spezifikationen



GoodKnight H₂O
ist kompatibel mit:



GoodKnight
420-Familie

&



GoodKnight 425
Bi-Level-Serie

Technische Daten

• Maximaler Flow:	120 l/min (inkl. Leckfluss)
• Strömungswiderstand/Resistance:	0,2 cm H ₂ O
• Maximaler Betriebsdruck:	25 cm H ₂ O
• Anfeuchtung:	12 mg H ₂ O/l bei 60 l/min und Maximaleinstellung
• Aufheizdauer:	≤ 45Minuten
• Maße (BxHxL):	170x95x280 mm
• Leergewicht:	0,8 kg
• Betriebsvolumen:	213 cm ³ (minimales Gasvolumen in Kammer)
• Nutzbares Kammervolumen:	350 ml
• Maximaler Wasserstand:	Auf Kammer angezeigt

Effektive Anfeuchtung: Der 350 ml große Wasservorrat der Kammer reicht über die gesamte Nacht.

Einfache Reinigung: Die zweiteilige Kammer ist leicht zu zerlegen und sorgt für problemlose Reinigung und Pflege.

Leichte Handhabung: Einfache Feuchte-Einstellung per Drehknopf.

Platzsparendes Design: Verlängert die Standfläche der GoodKnight 420/425-Geräte um nur 7,5 cm.

Bestellinformation

Artikelbezeichnung	REF
GoodKnight H ₂ O Warmluftbefeuchter	M-114600-IN
GoodKnight H ₂ O Befeuchterkammer	M-314600-00
Verbindungsadapter (Kammer/CPAP)	M-414600-05
Kammeröffner	M-414600-12
Netzanschlussleitung	M-660600-04

CE
0459

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. *GoodKnight ist ein Warenzeichen von Nellcor Puritan Bennett Inc. Hersteller: Mallinckrodt Développement France, F-54601 Villers-Les-Nancy, Cedex, France. © 2005 Tyco Healthcare. Alle Rechte vorbehalten.

C-AD-GKH20/D

tyco
Healthcare

Puritan Bennett

Vertrieb durch:

Tyco Healthcare Deutschland GmbH
Gewerbepark 1
D-93333 Neustadt/Donau
GERMANY
Tel: + 49 (0) 18 05 89 22 55
Fax: + 49 (0) 80 01 85 01 01
www.tycohealth.de

Tyco Healthcare Austria GmbH
Campus 21
Europaring F09402
A-2345 Brunn am Gebirge
AUSTRIA
Tel: + 43 (0) 22 36 37 88 39
Fax: + 43 (0) 22 36 37 88 39-40
www.tycohealthcare.com

Tyco Healthcare Switzerland Ltd.
Roosstrasse 53
Postfach
CH-8832 WOLLERAU
SWITZERLAND
Tel: + 41 (0) 44 786 50 50
Fax: + 41 (0) 44 786 50 10
www.tyco-healthcare.ch



900673 DTP 09/05, IP 09/05