
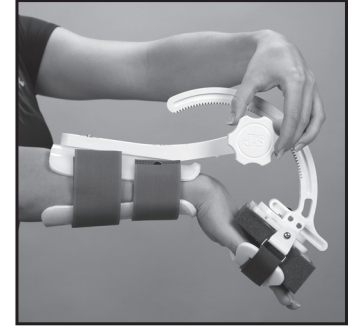



## INSTRUCCIONES DE CALZADO

Es mejor realizar la sesión de terapia JAS estando sentado confortablemente. El aparato puede estar apoyado en su falda o en una mesa frente a usted. No debe caminar durante la sesión de tratamiento JAS.

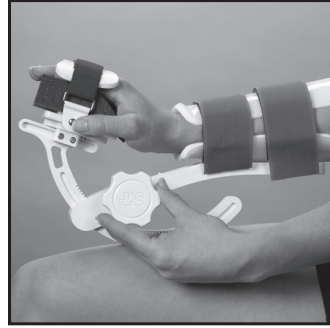


## USO PARA EXTENSIÓN

### PASO 1: COLOQUE LA MANO Y EL ANTEBRAZO EN EL APARATO

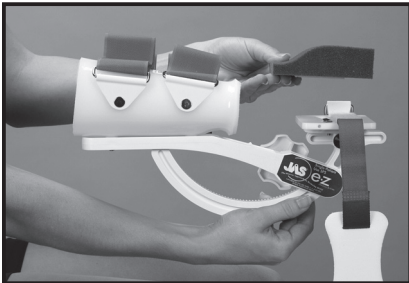


- Pegue el velcro del apoyo de extensión a la bandeja para la mano.
- Afloje todas las correas.

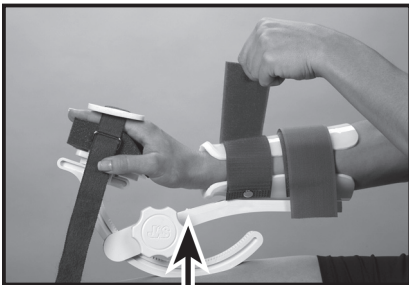


- Deslice su brazo en el aparato, con el brazo de movimiento debajo de la muñeca.
- Alinee la muñeca con las marcas en el aparato.
- Ajuste las correas del antebrazo.

### PASO 2: AJUSTE LA POSICIÓN DEL SOPORTE PARA LA MANO

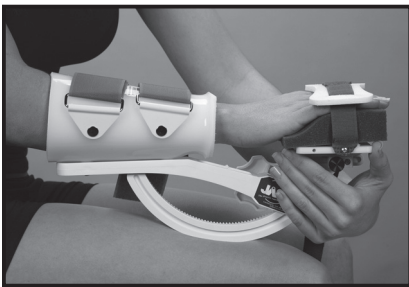

- Afloje la perilla al costado del soporte para la mano, y deslícela hacia adelante o atrás hasta que quede debajo de la palma de la mano y los dedos.
- Vuelva a ajustar la perilla.


### PASO 3: AJUSTE LA CORREA DEL SOPORTE PARA MANO Y COMIENCE LA TERAPIA

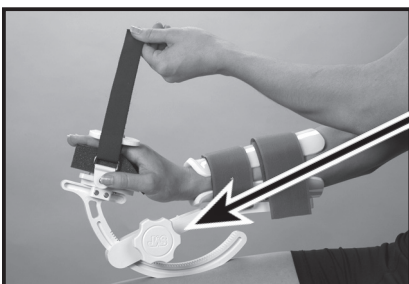


- Ajuste la correa de la mano.
- Comience el tratamiento rotando la perilla de terapia según se detalla en el reverso de la hoja.

## USO PARA FLEXIÓN

### PASO 1: COLOQUE LA MANO Y EL ANTEBRAZO EN EL APARATO

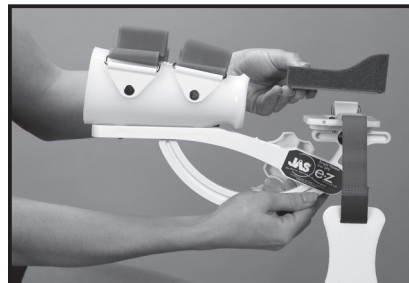

- Pegue el velcro del apoyo de flexión a la bandeja para la mano.
- Afloje todas las correas.

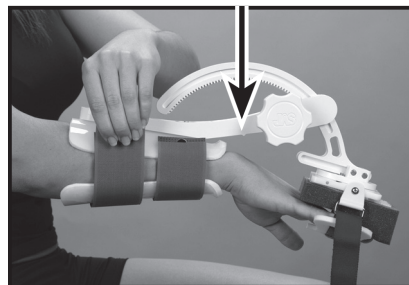


- Deslice su brazo en el aparato, con el brazo de movimiento encima de la muñeca.
- Alinee la muñeca con las marcas en el aparato.
- Ajuste las correas del antebrazo.

### PASO 2: AJUSTE LA POSICIÓN DEL SOPORTE PARA LA MANO



- Afloje la perilla al costado del soporte para la mano, y deslícela hacia adelante o atrás hasta que quede debajo de la palma de la mano y los dedos.
- Vuelva a ajustar la perilla.

### PASO 3: AJUSTE LA CORREA DEL SOPORTE PARA MANO Y COMIENCE LA TERAPIA

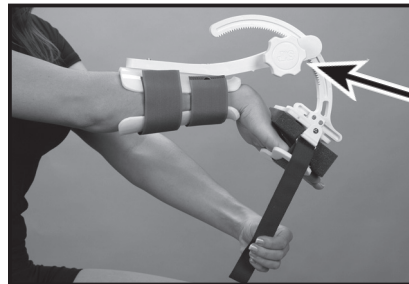

- Ajuste la correa de la mano.
- Comience el tratamiento rotando la perilla de terapia según se detalla en el reverso de la hoja.

NOTA: Si siente presión o molestia en la mano o en la muñeca durante la sesión de terapia CDM, afloje la perilla negra y deslice el soporte para la mano hacia afuera.