

An die betroffenen Kunden

Juli 2005

mit Dräger Untersuchungsleuchte Sola 300

**betroffener Lieferzeitraum:
Juli 2004 bis Aug 2005**

Wichtiger Sicherheitshinweis!

Untersuchungsleuchte Sola 300: Griffarretierung kann sich lösen und der Leuchtkörper herausfallen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer Produktbeobachtung ist uns ein Fall bekannt geworden, bei dem sich bei der Positionierung der Untersuchungsleuchte Sola 300 mit Hilfe des Handgriffs, die Arretierung des Griffs löste, dieser herausrutschte und hierbei das aufgesteckte Leuchtmittel zerbrach. Es fielen kleine Glassplitter herunter. Es entstand kein Personenschaden.

Als Ursache für dieses unbeabsichtigte einfache Lösen stellte sich bei der Untersuchung eine zu geringe Federkraft im Arretiermechanismus heraus. Die weitere Analyse ergab, dass in der Komponentenmontage seitens unseres Lieferanten - entgegen der Dräger-Spezifikation - eine falsche Feder eingebaut wurde. Aus diesem Grund ist ein Wiederholungsfall nicht auszuschließen und könnte dann zu einer Gefährdung eines Patienten oder einer anderen Personen führen.

Um zukünftig ein solches unbeabsichtigtes Lösen der Arretierung zu verhindern, haben wir einen Rüstsatz entwickelt und diesem Sicherheitshinweise bereits beigefügt. Die Montage dieses Rüstsatzes ist sehr einfach (wie der Wechsel des Leuchtmittels) und klar beschrieben; sollten Sie dennoch Hilfe durch einen DrägerService Mitarbeiter bevorzugen, wenden Sie sich bitte an den Ihnen bekannten Ansprechpartner.

Die betroffenen Lampen lassen sich eindeutig durch den fehlenden Griff am äußeren Gehäuse identifizieren.



(nicht betroffen)



(betroffen)

Dräger Medical AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
D-23558 Lübeck
Postanschrift:
D-23542 Lübeck
Telefon +49-18 05-3 72 34 37
Telefax +49-4 51-8 82 37 79
E-Mail: cod@draeger.com
<http://www.draeger.com>

Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 4096

Bankverbindungen:
Dresdner Bank AG, Lübeck
Konto-Nr. 371 077 400
BLZ 230 800 40
Swift-Code DRES DE FF 230
Landesbank Schleswig-Holstein,
Kiel
Konto-Nr. 7 053 002 797
BLZ 210 500 00
Swift-Code KILADE 22

Deutsche Bank AG, Lübeck
Konto-Nr. 030 209 100
BLZ 230 707 00
Swift-Code DEUTDE 22
Commerzbank AG, Lübeck
Konto-Nr. 328 014 679 500
BLZ 230 400 22
Swift-Code COBA DE FF 230

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dipl.-Kfm. Theo Dräger
Geschäftsführer:
Dräger Medizintechnik
Verwaltungs AG
Vorstand:
Dr. Wolfgang Reim

Wir bedauern die Ihnen dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten, halten diese Maßnahme jedoch im Interesse der Sicherheit für notwendig. Die Dräger Medical bittet um Ihr Verständnis und bedankt sich im voraus für Ihre Unterstützung.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr zuständiger Kundenbetreuer gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dräger Medical AG & Co. KGaA
Leitung Core Component Center

i.v. Schlör
Georg Schlör