


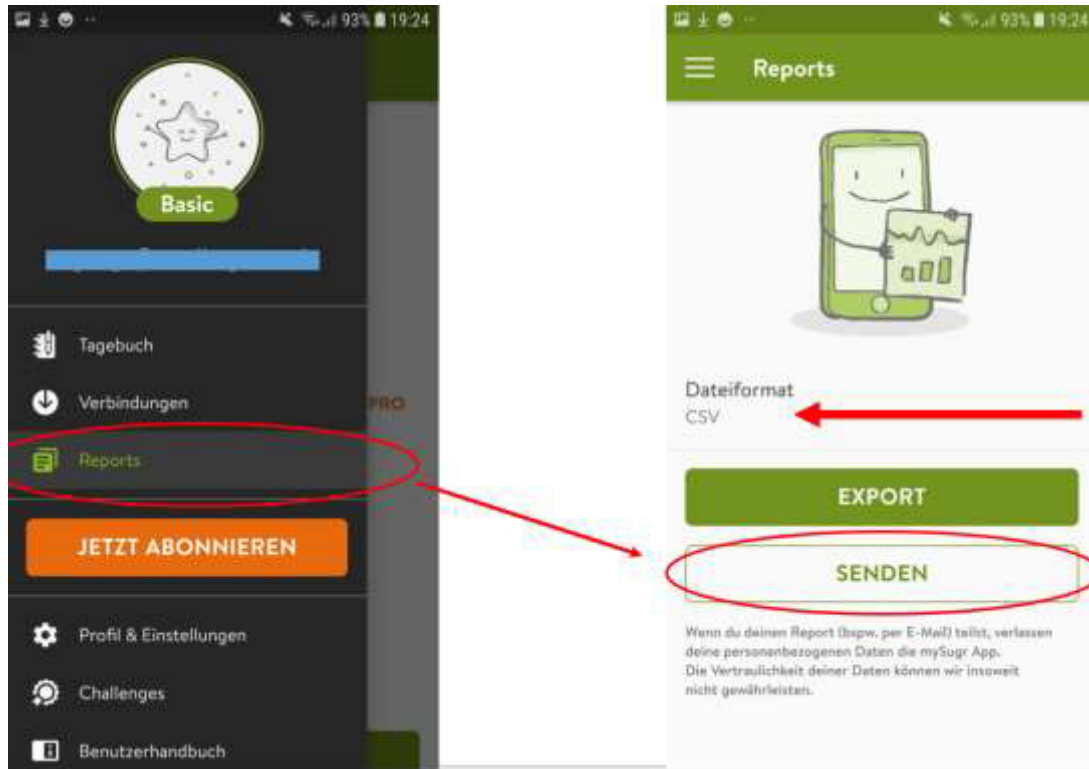

Schritt 1



Wechseln Sie in der mySugr App in das Menü **REPORTS** und wählen dort das **DATEIFORMAT „CSV“**

Klicken Sie dann auf **SENDEN**.



Schritt 2

Wählen Sie in der erscheinenden Liste die App **DIABASS SecureSend** aus

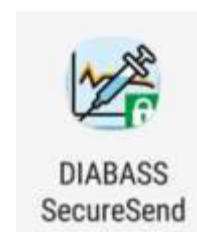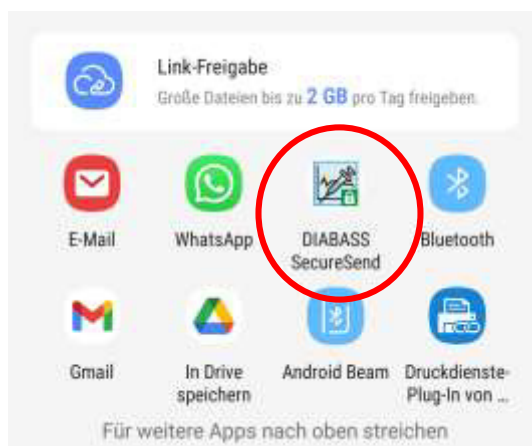




Schritt 3

Die *DIABASS SecureSend* App startet nun automatisch und zeigt die zu versendende Datei.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

Schritt 4

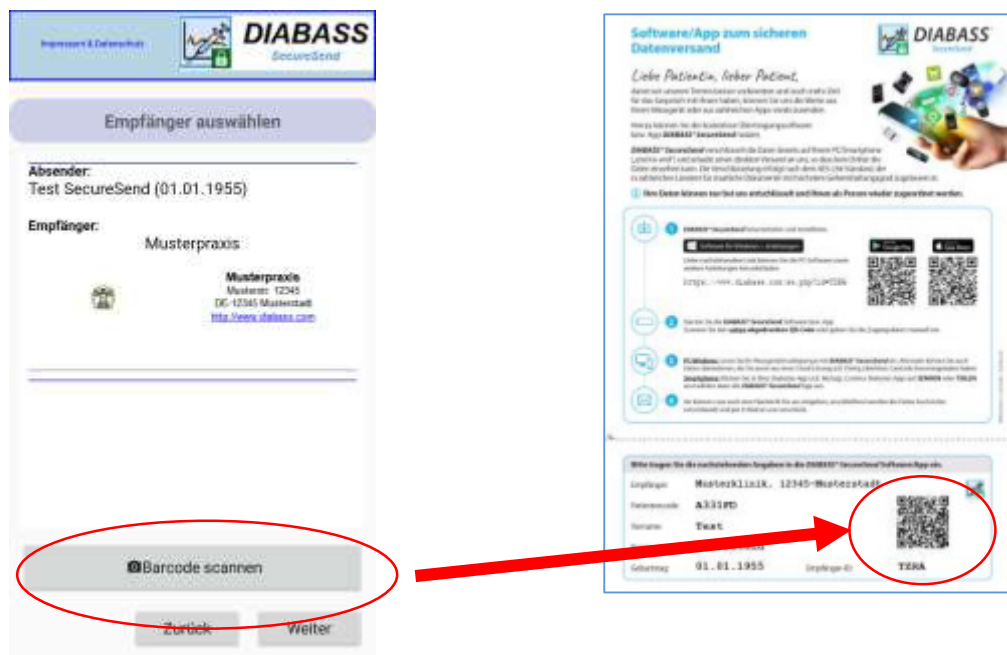

Klicken Sie auf **BARCODE SCANNEN** und scannen den Barcode vom Infoblatt, welches Sie von Ihrer Praxis erhalten haben. Es werden anschließend die Daten des Empfängers angezeigt.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

Schritt 5

Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben.

Klicken Sie dann auf **WEITER**



Schritt 6

Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für die Übermittlung vorbereitet.

Sie können nun wählen, auf welche Weise die Daten verschickt werden sollen.

Versand über E-Mail App:

Es wird eine Nachricht in Ihrem Standard-Email-App erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden

Versand über Server:

Die verschlüsselten Daten werden an den *DIABASS SecureSend*-Server übermittelt. Von dort werden diese dann per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt und anschließend wieder gelöscht.

Bestätigen Sie mit **WEITER**

The screenshot shows the 'Übermittlungsmethode wählen' (Select transmission method) screen. At the top, there is a header with 'Impressum & Datenschutz' and the 'DIABASS SecureSend' logo. Below the header, the text reads 'Bitte wählen Sie die Versandart aus' (Please select the shipping method). There are two radio button options:

- Versand über eMail-App**
Es wird eine eMail in der Mail-App erzeugt die Sie dann selbständig verschicken können
- Versand über Server**
Die verschlüsselten Daten werden über den Server von DIABASS SecureSend verschickt

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Abbruch' (Cancel) and 'Weiter' (Next).