

# MANUAL DE USO


## Montura Doble para Equinoterapia

Luego del uso de la montura, se extrae del animal procediendo en sentido inverso a los pasos de la colocación. Por último, se deja secar y airear para finalizar con el guardado.

En caso de ser necesario los estribos:

Pasar la estribera por el travesaño del estribo, de tal manera que el frente de la hebilla coincida con la parte interna del capacho del estribo (donde se introduce el pie). Luego pasar el extremo de la estribera sin hebilla por la argolla de la montura de abajo hacia arriba y ajustar según la altura que se requiera. Ambos estribos deben estar iguales y equilibrados.


**Importante:** el capacho debe quedar con el frente apoyado sobre el caballo y el dorso mirando hacia afuera, para que las estriberas no se giren y no molesten las piernas.

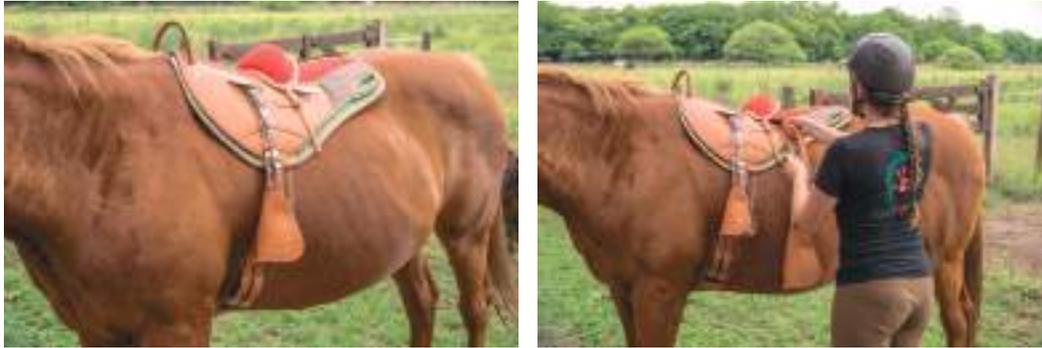

### CHAÑAR



### PEPERINA

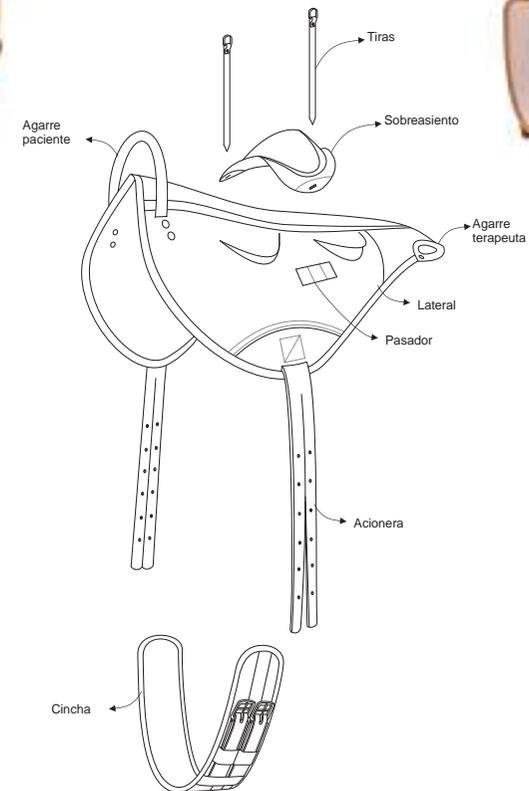

## CUIDADO DEL CUERO- LIMPIEZA

1. Eliminar el polvo y demás partículas superficiales que estén sobre el cuero con un cepillo de cerdas suaves.
2. Humedecer una esponja con agua tibia, y con jabón neutro o jabón especial para cuero limpiar suavemente la superficie de cuero.
3. Retirar todo el jabón con la esponja y con agua limpia.
4. Pasar un paño seco que no deje pelusas y dejar secar bien al aire libre.
5. Aplicar aceite o grasa para cuero para que se hidrate. La nutrición favorece la protección y evita agrietamientos.

Para mayor información consulte nuestra web: [monturasequin.com.ar](http://monturasequin.com.ar)

### CONTACTO

[www.monturasequin.com.ar](http://www.monturasequin.com.ar)  
[info@monturasequin.com.ar](mailto:info@monturasequin.com.ar)

*toquin*<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL DESIGN

*toquin*<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL DESIGN

## PASOS PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN

### 1. Colocación de la montura sobre el animal

Sujetar con la mano izquierda el borren delantero de la montura (que posee un agarre en la parte superior) y con la mano derecha el borren trasero. Colocar suavemente por el lado izquierdo del caballo sobre el dorso del mismo. Utilizar como referencia las banderas de Argentina que posee en cada extremo para alinear la misma con la columna vertebral del animal. La montura debe quedar equilibrada y simétrica. Se sugiere poner debajo una sudadera o mandil para proteger el dorso del caballo y preservar la montura.



### 2. Sujeción de la montura al caballo

Del lado derecho del caballo tomar las acioneras o latiguillos de la montura y pasarlos por las hebillas de la cincha, del extremo que están fijas. Luego, del lado izquierdo del animal tomamos la cincha que cuelga y pasamos las acioneras por las hebillas con elástico y sujetamos suavemente. Corroborar que la montura se mantenga equilibrada. Se recomienda no apretar de golpe, sino hacer caminar al caballo unos pasos para que suelte el aire y luego ajustamos la cincha subiendo uno o dos puntos de las acioneras.



### 3. Colocación del sobre-asiento

Apoyar el sobre-asiento en la zona superior de la montura y verificar que quede simétrico. Tomar una tira que posee en uno de sus extremos y deslizarlo por alguno de los huecos del pasador de la montura que tiene en sus laterales. Agarrar el extremo de la tira y pasarla por su otro extremo con argollas y tirar hacia abajo. Luego trabar pasando la punta de la tira entre las argollas. Repetir el procedimiento del lado contrario del sobre-asiento.

Este sobre-asiento intermedio es regulable, tiene tres posiciones, para generar un asiento semiprofundo según la contextura física del paciente, y es extraíble de no ser necesario su utilización.



Colocar la tira por el pasador



Pasar la tira a través de las argollas, ubicándolas debajo del pasador



Ajustar haciendo fuerza hacia abajo