

Katalog Lichtsignalanlagen & Hörlösungen





Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen

Für Menschen mit einer Hörminderung sind alltägliche Dinge, die andere für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel das Hören der Türklingel, eine echte Herausforderung. Aber so muss es nicht sein. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, um Ihr Hören zu verbessern. Bellman & Symfon bietet Produkte an, die Ihnen Ereignisse zu Hause signalisieren und die Ihnen helfen, Gesprächen besser folgen zu können.

Signalisierungssystem

| | |
|----------------------|----|
| Übersicht | 3 |
| Empfänger | 5 |
| Sender | 7 |
| Zubehör | 9 |
| Visit-Pakete | 11 |
| Stand-Alone Produkte | 12 |

Hörhilfen

| | |
|-----------------------------|----|
| Übersicht | 13 |
| Hörsystem und Hörverstärker | 15 |
| Produktvergleich | 16 |
| Zubehör | 17 |





Das Visit System Zuhause hören

Das Visit System hilft Menschen mit Hörverlust in ihrem Wohnraum Signale, wie z.B. Türklingel, Telefon oder Rauchmelder wahrzunehmen. Zu wissen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn etwas passiert, bietet ein beruhigendes und sicheres Gefühl. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Visit Sender und Empfänger in einem typischen Haushalt arbeiten.

Sender

- 1 **Tür-Sender**
Erkennt, wenn es an der Tür klingelt
Art. Nr. BE1411



- 2 **Telefon-Sender**
Erkennt, wenn das Telefon oder Handy klingelt
Art. Nr. BE1431 + BE9251



- 3 **Rauchmelde-Sender**
Erkennt sowohl Rauch als auch Hitze
Art. Nr. BE1480



Empfänger

- 4 **Alarm Clock mit Vibrationskissen**
Weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und Vibration
Art. Nr. BE1580



- 5 **Tischblitzlampe**
Benachrichtigt mit hellem Blitzlicht
Art. Nr. BE1441 / BE1442



- 6 **Pager**
Benachrichtigt mit dezenter Vibration
Art. Nr. BE1470



1. Türklingel-Erkennung



4. Benachrichtigung in der Nacht



2. Festnetz- und Mobilfunk-Erkennung



3. Rauch- und Brandmeldung



5. Benachrichtigung am Tag



6. Benachrichtigung im Freien

Visit Empfänger

Smart, funkbasierend und benutzerfreundlich

Tischblitzlampe

BE1441/BE1442 | HMV 16.99.09.2027/HMV 16.99.09.2026



Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet kabellos über Funk und lässt sich variabel ausrichten. Es ist auch eine Version mit Ausfall-Akkus (BE1442) verfügbar.

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Helles Blitzlicht | 30 Candela Xenon Licht |
| Klare Identifikation | Unterschiedliche Farb-LEDs |
| Drehbarer Kopf | Einfache Lichtausrichtung |
| Ausfall-Akkus (BE1442) | Funktioniert bei Stromausfall |
| Größe und Gewicht | Ø 88 x 155 mm, 320 g |



Tragbarer-Empfänger

BE1450 | HMV 16.99.09.2015



Beschreibung

Der tragbare Empfänger benachrichtigt Sie mit einem lauten Tonsignal, wenn ein Sender aktiviert wird. Er ist einfach zu bedienen und kabellos, sodass Sie ihn auch auf dem Balkon oder im Garten nutzen können.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Lautes Tonsignal | Einstellbar bis zu 93 dB |
| Klare Identifikation | Töne und Lichtsignale |
| Einfache Einrichtung | Wandhalterung inkludiert |
| Lange Leistung | Bis zu 3 J. Batterielebensdauer |
| Größe und Gewicht | 130 x 165 x 36 mm, 590 g |



Visit Alarm Clock

BE1580 | HMV 16.99.09.3021



Beschreibung

Der Blitzlichtwecker weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und/oder Vibration, wenn es Zeit ist aufzustehen oder ein Sender aktiviert wird. Zusätzlich verfügt er über ein sanftes, blaues Nachtlicht.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Lautes Alarmsignal | Schrittweise auf über 100dB |
| Intensives Blitzlicht | Vier helle LED Lichter |
| Vibrationskissen | Weckt Sie mit Vibration |
| Ausfall-Akkus | Funktioniert bei Stromausfall |
| Größe und Gewicht | 121 x 92 x 108 mm, 390 g |



Signal **Ton** **Blitz** **Vibration**

Pager-Empfänger

BE1470 | HMV 16.99.09.4002



Beschreibung

Der Pager benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Während der Nacht können Sie ein Vibrationskissen an das Ladegerät (Zubehör) anschließen.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Diskrete Vibration | Am Gürtel oder in der Tasche |
| Klare Identifikation | Individuelle Symbole und Farben |
| Leicht und mobil | Inkl. Gürtel-Clip und Trageband |
| Optionales Ladegerät | Anschluss für 2 Vibrationskissen |
| Größe und Gewicht | 57 x 86 x 29 mm, 70 g |



Armbandempfänger

BE8102 | HMV 16.99.09.1009



Beschreibung

Der Armband-Empfänger benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Sie tragen ihn einfach wie eine Uhr, die Ladestation ist bereits im Lieferumfang enthalten.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Diskrete Vibration | Direkt am Handgelenk |
| Klare Identifikation | Individuelle Symbole und Farben |
| Inklusive Ladegerät | Anschluss für Vibrationskissen |
| Flexibel | Beinhaltet Leinen-Armband |
| Größe und Gewicht | 38 x 12 x 49 mm, 27 g |



Visit Sender

Diskret, wartungsfrei und einfach zu installieren

Telefon-Sender

BE1431 | HMV 16.99.09.0084



* Mobile Phone Sensor (Zubehör) erforderlich

Beschreibung


Der Telefon-Sender hilft Ihnen, das Telefonklingeln zu bemerken. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration informiert. Sie können eine breite Palette von Zubehör an die drei separaten Trigger-Eingänge anschließen.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Zuverlässig | Bis zu 250 m Reichweite |
| Flexibel | Erkennt Festnetz- & Handyanrufe* |
| Multi-Eingang | Drei separate Trigger-Eingänge |
| Anpassbares Signal | Wählen Sie eines für jeden Trigger |
| Größe und Gewicht | 65 x 100 x 27 mm, 120 g |



Tür-Sender

BE1411 | HMV 16.99.09.0082

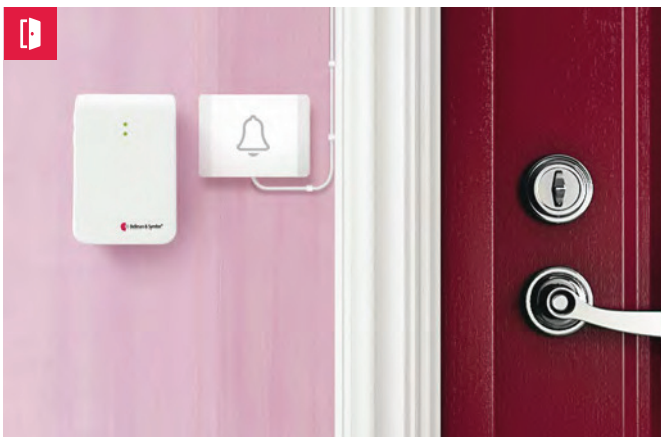

Beschreibung


Der Türsender informiert Sie, wenn es an der Haustür klingelt. Wenn die Türklingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, meldet er dies den Empfängern, welche Sie mit Ton, Licht oder Vibration informieren.

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zuverlässig | Bis zu 250 m Reichweite |
| Flexibel | Auch für Gegensprechanlagen |
| Sichere Erkennung | Dual-Mikrofon-Technologie |
| Programmierbar | Durch „lernen“ jeden Ton erkennen |
| Größe und Gewicht | 65 x 100 x 27 mm, 120 g |



Druckknopf-Sender

BE1420 | HMV 16.99.09.0072

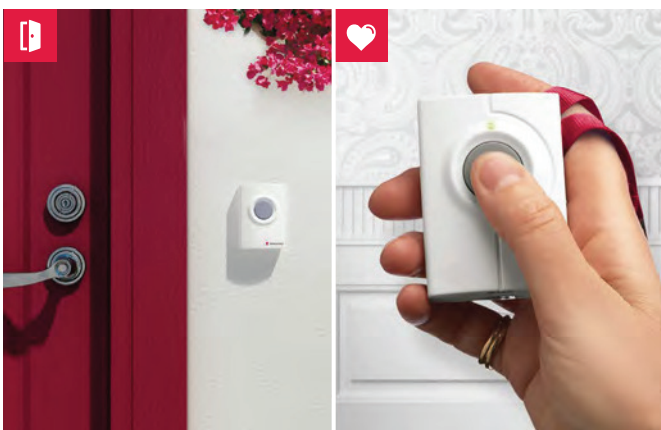

Beschreibung

Der Druckknopf-Sender arbeitet als Funk-Türklingel. Bei Betätigung gibt er ein Signal an den Empfänger, der Sie mit Blitzlicht, Tonsignal und/oder Vibration informiert. Er kann auch als portabler Personenruf-Alarm verwendet werden.

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Zuverlässig | Bis zu 200 m Reichweite |
| Flexibel | Verwendung als Personenruf |
| Einstellbare Anzeige | Signal Unterscheidung |
| Lange Leistung | Bis zu 2 J. Batteriebensdauer |
| Größe und Gewicht | 48 x 66 x 23 mm, 50 g |



Erkennung

Tür Telefon Feuer Baby Alarm



Rauchmelde-Sender

BE1480 | HMV 16.99.09.0079



Beschreibung

Der Rauchmelder warnt Sie sofort im Falle eines Brandes. Er verfügt über Batterieüberwachung, die Sie auf eine schwache Batterie hinweist und ist mit dem Toaster-Modus ausgestattet, um Fehlalarme beim Kochen zu vermeiden.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Opto-thermal | Erkennt Rauch und Hitze |
| Batterieüberwachung | Automatische Anzeige |
| Toaster-Modus | In Bereichen mit Küchendünsten |
| Broadcast-Modus | Warnung an alle Empfänger |
| Größe und Gewicht | Ø 100 x 30 mm, 110 g |



Babyruf-Sender

BE1491 | HMV 16.99.09.0083



Beschreibung

Der Babyruf-Sender informiert Sie, sobald Ihr Kind Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration alarmiert, sodass Sie immer in der Nähe Ihres Kindes sind.

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Zuverlässig | Bis zu 250 m Reichweite |
| Flexibel | Empfindlichkeit und Verzögerung |
| Anpassbares Signal | Separates Signal á Kind |
| Optional Kontaktmatte | Wenn Ihr Kind das Bett verlässt |
| Größe und Gewicht | 65 x 100 x 27 mm, 120 g |



Zubehör

Erweitern Sie Ihre Visit Lösung

Mobile Phone Sensor

BE9250/BE9251



Beschreibung

Der Mobile Phone Sensor wird aktiviert, wenn ein Mobiltelefon oder der Tablet-Bildschirm aufleuchtet, zum Beispiel bei eingehendem Anruf oder einer Nachricht. Verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender oder direkt mit der Tischblitzlampe.

Optische Erkennung Über Hintergrundbeleuchtung

Empfindlichkeit Sichtbares Licht >3 lux

Anschlüsse (BE9250) Sensor: 2,5mm Klinkenstecker
Adapter: 3,5mm Klinkenstecker

Batterie (BE9250) 1 x AAA 1,5 V alkaline
Arbeitszeit > 1 Jahr



Vibrationskissen

BE1270



Beschreibung

Das Vibrationskissen weckt sogar Tiefschläfer. Einfach das Vibrationskissen unter Ihre Matratze oder Ihr Kopfkissen platzieren und mit einem Visit Empfänger oder Ladestation verbinden.

Kraftvolle Vibration Weckt auch Tiefschläfer

Oberfläche Anti-Rutsch-Beschichtung

Sichere Nutzung Niedrig-Spannungsbetrieb

Kabellänge 2 m

Größe und Gewicht 88 x 88 x 27 mm, 120 g



Repeater

BE1510

Beschreibung

Der Repeater wird verwendet, um die Reichweite Ihres Visit Systems zu erweitern. Er ist nützlich bei großen Flächen oder in Bereichen mit dicken Wänden und kann auch als Multi-Sender genutzt werden.

Zuverlässig Bis zu 200 m Reichweite

Signalwiederholung Ermöglicht mehrere Repeater

Netzbetrieb Minimierte Wartung

Batteriebetrieb Funktioniert bei Stromausfall

Größe und Gewicht 60 x 98 x 30 mm, 110 g



Bridge

BE1520

Beschreibung

Die Bridge ermöglicht es Visit Produkte, die auf den 433 MHz-Frequenzen arbeiten, zusammen mit den Visit Produkten der Frequenz 868 MHz zu betreiben. Sie kommuniziert in beiden Richtungen zwischen den Frequenzen.

Zuverlässig Bis zu 200 m Reichweite

Zweiwege-Frequenz Arbeitet in beide Richtungen

Netzbetrieb Minimierte Wartung

Batteriebetrieb Funktioniert bei Stromausfall

Größe und Gewicht 60 x 98 x 30 mm, 110 g



Externes Mikrofon

BE9199/BE9200

Beschreibung

Das externe Mikrofon wird mit dem Tür-Sender verwendet. Sie können zum Beispiel hiermit die Gegensprechanlage erkennen lassen, während das interne Mikrofon des Senders die Türklingel erkennt.

| | |
|------------|----------------|
| Kabellänge | 2,5 m / 0,75 m |
|------------|----------------|

| | |
|----------|-----------------|
| Mikrofon | Piezeelektrisch |
|----------|-----------------|

| | |
|------------|-------------|
| Anschlüsse | 3,5 mm mono |
|------------|-------------|

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 15 g |
|---------|------|

| | |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|



Externes Triggerkabel

BE9086

Beschreibung

Das externe Anschlusskabel wird verwendet, um die Clock Pro BE1370 an die Tischblitzlampe BE1441 anzuschließen. Die Clock weckt Sie dann, sobald einer Ihrer Sender aktiviert wird.

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 1,5 m |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Alarm Clock Anschluss | 3,5 mm stereo |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Empfänger Anschluss | 3,5 mm mono |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 20 g |
|---------|------|

| | |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|



Magnetschalter

BE9023

Beschreibung

Wird zusammen mit dem Telefon Sender verwendet und benachrichtigt Sie z.B. wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Trennen der Magnete wird dem Empfänger signalisiert, der dies mit Ton-, Lichtsignal oder Vibration anzeigt.

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 0,5 m |
|------------|-------|

| | |
|------------|-------------|
| Anschlüsse | 3,5 mm mono |
|------------|-------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| Schalter AN | < 1 cm vom Magnet |
|-------------|-------------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Schalter AUS | > 2 cm vom Magnet |
|--------------|-------------------|

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 25 g |
|---------|------|



Wandhalterung

BE9075

Beschreibung

Die Wandhalterung wird verwendet, um die Visit Tischblitzlampe oder den Bellman Ringer Flash an die Wand zu montieren, sodass das Blitzlicht überall im Raum gesehen werden kann. Sie beinhaltet Schrauben und Dübel.

| | |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|---------|-----------------|
| Nutzung | Im Innenbereich |
|---------|-----------------|

| | |
|-------|-----------------|
| Größe | 45 x 90 x 50 mm |
|-------|-----------------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 110 g |
|---------|-------|

| | |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|



Pager-Ladestation

BE1260

Beschreibung

Das Pager-Ladegerät wird verwendet, um die Akkus Ihres Pagers aufzuladen. Stellen Sie dieses auf Ihren Nachttisch und verbinden Sie es mit einem Vibrationskissen, um während des Schlafs benachrichtigt zu werden, sobald ein Sender aktiviert wird.

| | |
|----------|-------------|
| Ladezeit | ~ 6 Stunden |
|----------|-------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ausfall-Batterien | Funktioniert bei Stromausfall |
|-------------------|-------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| Anschlüsse | Zwei Vibrationskissen |
|------------|-----------------------|

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 1,7 m |
|------------|-------|

| | |
|-------------------|------------------------|
| Größe und Gewicht | 78 x 88 x 43 mm, 385 g |
|-------------------|------------------------|



Alarmtrittmatte

BE9024

Beschreibung

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand das Zimmer betritt oder verlässt.

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 1,5 m |
|------------|-------|

| | |
|------------|-------------|
| Anschlüsse | 3,5 mm mono |
|------------|-------------|

| | |
|-------|------------------|
| Größe | 745 x 420 x 3 mm |
|-------|------------------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 675 g |
|---------|-------|

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|



Visit Anwendungssets

Die einfachste Handhabung

Safe Anwendungsset

BE8037



Beschreibung

Das Safe Set weckt Sie sofort mit Blitzlicht, Vibration und einem Weckton, sobald ein Feuer entstehen sollte - auch wenn Sie mehrere Zimmer vom Rauchmelder entfernt schlafen. Enthält einen Rauchmelder, einen Wecker und ein Vibrationskissen.

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kabellos | Bis zu 200 m Reichweite |
| Einfache Installation | Beinhaltet alles Benötigte |
| Ausfall-Akkus | Funktioniert bei Stromausfall |
| Zuverlässig | Geprüft von Gesundheitsbehörden |
| Lieferumfang | BE1580, BE1480, BE1272 |



Care Anwendungsset

BE8041



Beschreibung

Das Care Set benachrichtigt Sie mit hellen Lichtblitzen und farbiger Anzeige, wenn es an der Tür klingelt oder jemand Sie anruft. Es enthält einen Funk-Türsender, der mit der beinhalteten Tischblitzlampe verbunden ist.

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Helles Blitzlicht | 30 Candela Xenon Licht |
| Einfache Installation | Beinhaltet alles Benötigte |
| Drehbarer Kopf | Einfache Lichtausrichtung |
| Zuverlässig | Geprüft von Gesundheitsbehörden |
| Lieferumfang | BE1441, BE1410, RJ11 Kabel |



Alarm Clock Pro Plus

BE8049



Beschreibung




Weckt Sie mit lauten Tonsignalen, hellen Blitzlicht LEDs und Vibrationen vom beiliegendem Vibrationskissen. Verbinden Sie den Wecker mit Ihrem Festnetz- oder Mobiltelefon und Sie werden über eingehende Anrufe oder Nachrichten informiert.

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Lauter Alarm | Schrittweise auf über 100dB |
| Helles Blitzlicht | Vier Blitzlicht-LEDs |
| Vibrationskissen | Weckt Sie mit Vibration |
| Benachrichtigung | Festnetz- und Mobiltelefon/Tablet |
| Lieferumfang | BE1370, BE1272, BE9250 |



Stand-Alone Produkte

Alarm Clocks und Signalverstärker

Ton  Blitz  Vibration 
Signal

Alarm Clock Pro

BE1370 | HMV 16.99.09.3022



Beschreibung

Der Wecker Pro weckt Sie mit extra lauten Wecktönen, hellen Lichtblitzen und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit cleveren Features wie Nachtlicht und Ausfallbatterie.

Lautes Alarmsignal Schrittweise auf über 100dB

Helles Blitzlicht Vier Blitzlicht-LEDs

Vibrationskissen Weckt Sie mit Vibration


Ausfall-Akkus Funktioniert bei Stromausfall

Größe und Gewicht 121 x 92 x 108 mm, 390 g



Alarm Clock Classic

BE1350 | HMV 16.99.09.3023

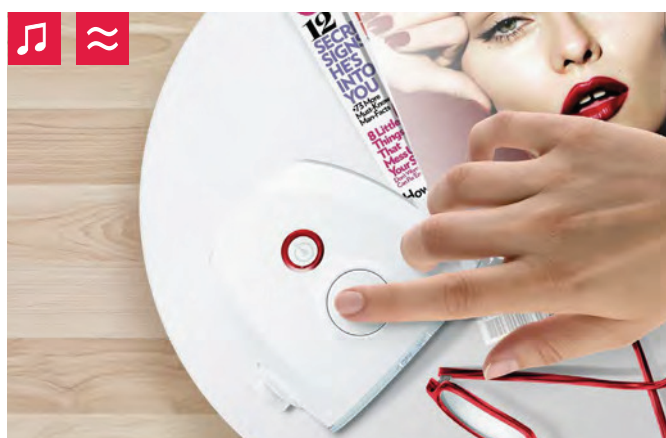

Beschreibung

Der Wecker Classic weckt Sie mit einem extra lauten Weckton und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist sehr einfach zu bedienen, hat ein beleuchtetes LCD-Display und große Einstelltasten.

Lautes Alarmsignal Schrittweise auf über 100dB

Vibrationskissen Weckt Sie mit Vibration

Einfache Bedienung Große Drehknöpfe

Beleuchtetes Display Einstellbare Beleuchtung

Größe und Gewicht 121 x 92 x 108 mm, 390 g



Bellman Ringer

BE1010

Beschreibung

Der Bellman Ringer informiert Sie mit einem kraftvollen Ton-Signal und einem Licht-Signal, wenn das Telefon klingelt. Sie können ganz einfach die Klingellautstärke, Ton und Klangbild auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Lautes Alarmsignal Einstellbar bis 95 dB

Flexible Einstellung Lautstärke und Klang

Lange Leistung ~ 3 J. Batteriebensdauer

Einfache Installation Inkl. Kabel und Adapter

Größe und Gewicht 95 x 155 x 32 mm, 350 g



Bellman Ringer Flash

BE1390

Beschreibung

Der Bellman Ringer Flash informiert Sie mit Blitzlicht, wenn das Telefon klingelt. Er ist portabel, einfach einzurichten und Sie können ihn zu Hause als auch an der Arbeit verwenden. Ein Außen-Lautsprecher kann ebenfalls angeschlossen werden.

Helles Blitzlicht 30 Candela Xenon Licht

Drehbarer Kopf Einfache Lichtausrichtung

Einfache Installation Inkl. Kabel und Adapter

Robustes Design Widersteht harten Bedingungen

Größe und Gewicht Ø 70 x 140 mm, 300 g



Hörsystem und Hörverstärker

Besser hören in belebten Umgebungen

Eine Hörhilfe unterstützt Menschen mit Hörverlust in belebten Umgebungen, wie z. B. am Arbeitsplatz oder in der Schule. Es filtert den Lärm und hebt Sprache hervor, sodass sie, auch wenn es laut um Sie herum ist, deutlich bleibt. Sie müssen sich nicht mehr so anstrengen, um zu verstehen was Ihre Mitmenschen sagen.

Die Bellman & Symfon Hörhilfen sind voll digital und mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten kompatibel. Wir bieten sowohl persönliche Hörverstärker für ein ruhiges Familienessen und für das Fernsehen, sowie erweiterte Hörsysteme für Vorträge und Konferenzen.


Nachfolgend erfahren Sie mehr über unsere Produkte.

Domino

Domino besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Empfänger (1) erfasst Sprache in Ihrer Nähe. Legen Sie ihn z. B. vor sich auf den Tisch. Der Sender (2) überträgt entfernte Sprache. Legen Sie ihn an das andere Ende des Tisches oder bitten Sie Ihren Lehrer diesen zu tragen.

Maxi und Mino

Maxi und Mino bestehen aus einer Einheit mit einem eingebauten Mikrofon. Platziere Sie ihn auf dem Tisch vor Ihnen, regulieren Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen und die Sprache wird klar und deutlich. Sie können Kopfhörer oder eine Induktionsschlinge nutzen.

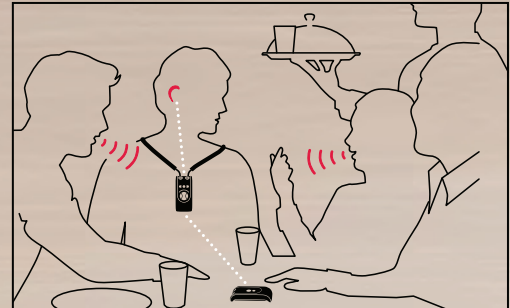


Im Restaurant

Ein Hörsystem hilft Ihnen, Sprache in geräuschvollen Umgebungen zu verstehen.



Bei der Arbeit

Legen Sie das Gerät auf den Tisch und...

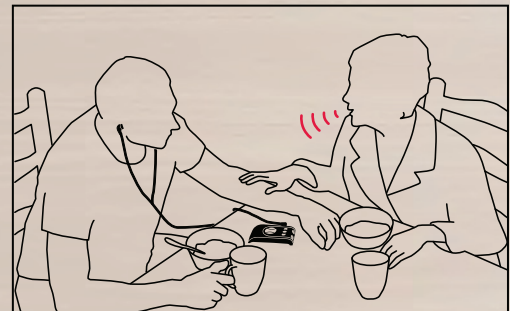

Zu Hause


Mit einem Hörverstärker muss Ihr Partner sich nicht ständig wiederholen oder laut sprechen.




Beim Fernsehen

Schließen Sie das Gerät an den Fernseher an, um...




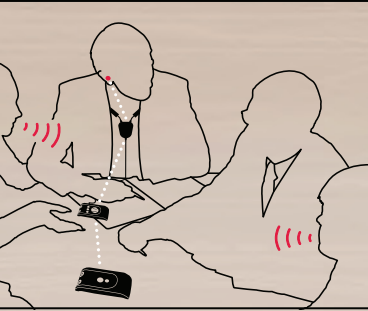


In der Arbeit
 Legen Sie die Einheiten auf beide Seiten des Tisches, um auch Sie an dem Gespräch teilzunehmen.

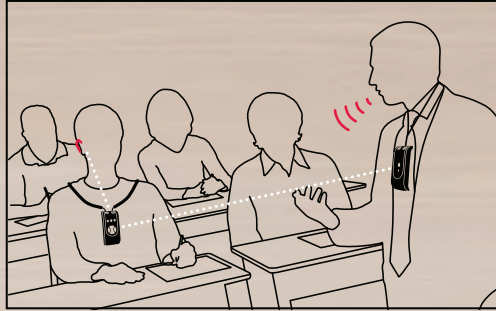

In der Schule
 Bitten Sie den Lehrer den Sender zu tragen, um die Sprache klar und deutlich zu verstehen.

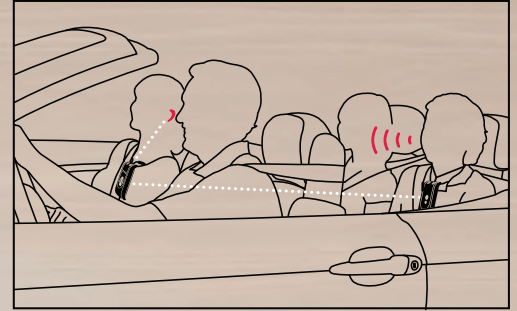

Im Auto
 Geben Sie den Sender Ihrem Begleiter, um den Verkehrslärm heraus zu filtern.

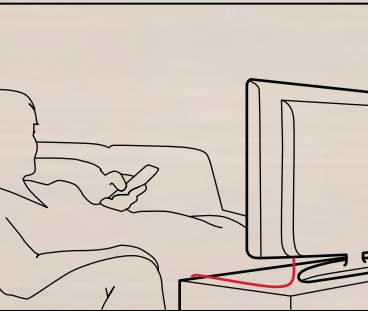

In der Wohnung
 Legen Sie ihn an das TV oder Radio an und hören Sie mit den Ohren Ihrer Familie.



In der Apotheke
 Legen Sie ihn vor sich auf den Tresen, um alle wichtigen Informationen zu verstehen.



Im Theater
 Hören Sie mit der Telefonspule an Orten, die mit einer Induktionsschleife ausgestattet sind.

2



Hörsystem und Hörverstärker

Entdecken Sie die Freude des besseren Hörens

Domino Hörsystem

BE8005 | HMV 13.20.07.0006



Beschreibung

Domino ist ein voll digitales Hörsystem, das die Sprache in lauten Umgebungen herausfiltert, damit Sie die Worte klar und deutlich hören. Es besteht aus einem Empfänger, für Sprache in Ihrer Nähe und einem Sender, für entfernte Sprache.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Mikrofon | Omni- und direktional |
| Signalverarbeitung | 16 bit digital Stereo |
| Funkverbindung | 2,4 GHz Breitband |
| Batterie | Aufladbare Lithium-Akkus |
| Größe und Gewicht | 99 x 48 x 22 mm, 74 g |



Mino Hörverstärker

BE2030



Beschreibung


Mino ist ein digitaler Hörverstärker für diejenigen, die ein kleines und leichtes Gerät wollen, das diskret in die Tasche passt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate verwenden.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Mikrofon | Omni- und direktional |
| Signalverarbeitung | 16 bit digital Stereo |
| Integrierte Telefonspule | Für Orte mit Ringschleifen |
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen- Akku |
| Größe und Gewicht | 99 x 48 x 22 mm, 74 g |



Maxi Hörverstärker

BE2020

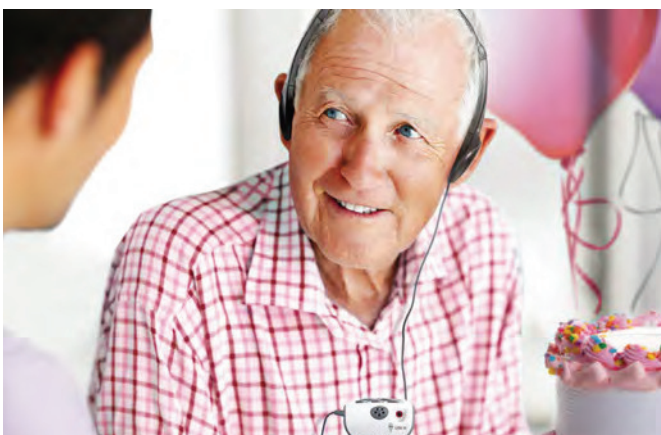

Beschreibung

Maxi ist ein robuster und benutzerfreundlicher digitaler Hörverstärker und speziell für Menschen mit haptischen oder visuellen Einschränkungen ausgelegt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte verwenden.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Mikrofon | Omnidirektional |
| Signalverarbeitung | 16 bit digital Stereo |
| Integrierte Telefonspule | Für Orte mit Ringschleifen |
| Batterie | 2 x AA 1,5V Batterien |
| Größe und Gewicht | 140 x 45 x 27 mm, 133 g |




Produktvergleich

Domino

Mino


Maxi

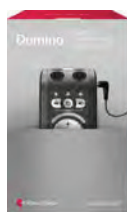

Ein Hörsystem, das auch in lauter Umgebung Sprache klar und deutlich überträgt



Ein kleiner und vielseitiger Hörverstärker, der diskret in die Innentasche passt

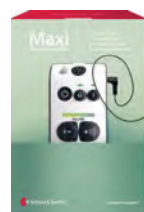

Ein robuster und benutzerfreundlicher Hörverstärker mit großen Tasten und klaren Indikatoren

Ideale Hörsituation

Leicht

Für das Fernsehen
Privates Gespräch
Familientreffen
Restaurant und Café
Geschäft und Warenhaus
Schule und Arbeitsplatz
Vortrag und Konferenz

Schwer

Für das Fernsehen
Privates Gespräch
Familientreffen
Restaurant und Café
Geschäft und Warenhaus

Für das Fernsehen
Privates Gespräch
Familientreffen

Funkverbindung

2,4 GHz Breitband, 128-bit Verschlüsselung –
Reichweite: Bis zu 25 Meter drinnen –

Mikrofon

2 Omnidirektionale
2 Direktionale

1 Omnidirektionales
1 Direktionales

1 Omnidirektionales
–

Signalverarbeitung

16 bit digital Stereo
Frequenzbreite: 20 Hz bis 10 KHz
Dynamische Kompression, 10-Kanäle
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle
Adaptiver Feedback Manager
–

16 bit digital Stereo
Frequenzbreite: 20 Hz bis 10 KHz
Dynamische Kompression, 10-Kanäle
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle
Adaptiver Feedback Manager
Telefonspule für Induktionsschleifen

16 bit digital Stereo
Frequenzbreite: 40 Hz bis 10 KHz
Dynamische Kompression, 10-Kanäle
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle
Adaptiver Feedback Manager
Telefonspule für Induktionsschleifen

Stromversorgung

Lithium-Ionen-Akkus
Arbeitszeit: bis zu 12 h
Ladezeit: bis zu 2,5 h

Lithium-Ionen-Akkus
Arbeitszeit: bis zu 18 h
Ladezeit: bis zu 2,5 h

2 x AA Alkali-Batterien
Arbeitszeit: bis zu 150 h
–

Bedienelemente

Versenkte Ein/Aus Taste
9 Stufen Lautstärkeregelung
9 Stufen Klangregelung
9 Stufen Balance-Regler
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,
Mikrofon und RF-Modus Einstellung
Erweiterte Einstellungen -
9 Parameter Menü

Versenkte Ein/Aus Taste
9 Stufen Lautstärkeregelung
9 Stufen Klangregelung
9 Stufen Balance-Regler
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,
Mikrofon und RF-Modus Einstellung
Erweiterte Einstellungen -
9 Parameter Menü

Versenkte Ein/Aus Taste
9 Stufen Lautstärkeregelung
5 Stufen Klangregelung
9 Stufen Balance-Regler
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,
Mikrofon und Induktion
Erweiterte Einstellungen -
3 Parameter Menü

Anschlüsse

2,5 mm Stereo Klinke
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke
Universal-Ladeanschluss

2,5 mm Stereo Klinke
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke
Universal-Ladeanschluss

2,5 mm Stereo Klinke
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke
–

Größe und Gewicht

99 mm x 48 mm x 22 mm (H x B x T)
Gewicht: á 74 g

99 mm x 48 mm x 22 mm (H x B x T)
Gewicht: 74 g

140 mm x 45 mm x 27 mm (H x B x T)
Gewicht: 133 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

- ✓ Domino Sender und Empfänger
- ✓ Gürtelclip aus Edelstahl
- ✓ Schlüsselband
- ✓ Robuste Reisetasche und Ohrhörer
- ✓ Ext. Mikrofon- und Kabelsatz
- ✓ Universal-Ladegerät
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

- ✓ Mino Hörverstärker
- ✓ Gürtelclip aus Edelstahl
- ✓ Schlüsselband
- ✓ Universal-Ladegerät
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

- ✓ Maxi Hörverstärker
- ✓ Gürtelclip
- ✓ Schlüsselband
- ✓ 2 x AA Alkali Batterien
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

Zubehör

Ergänzen Sie Ihre Lösung

Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



Beschreibung

Die Induktionsschlinge ist bequem, leicht und erzeugt eine hohe Ausgangsleistung. Verbinden Sie diese mit Ihrem Sprachverstärker und schalten Sie Ihr Hörgerät auf die „T“-Position. Erhältlich mit einem langen oder kurzen Anschlusskabel.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Hohe Leistung | Dual-Kanal-Ausgang |
| Gewebehülle | Komfortabel & hygienisch |
| Knotenfreies Kabel | Einfach zu nutzen |
| Vergoldete Stecker | Verhindert Korrosion |
| Kabellänge | 90 cm oder 15 cm |



Microset™

BE9129



Beschreibung

Das MicroSet™ ist ein Zubehör speziell für Mino, welches aus einem dezenten Revers-Mikrofon und einem Ohrhörer besteht. Bringen Sie das Mikrofon am Revers an, verstauen Mino in der Tasche und Sie haben die Hände frei für andere Dinge.

| | |
|------------|-----------------|
| Kabellänge | 95 cm |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo |
| Mikrofon | Omnidirektional |
| Gewicht | 15 g |
| Farbe | Schwarz |



Externes Mikrofon

BE9127

Beschreibung

Das externe Mikrofon kann als Remote-Mikrofon während der Sitzungen verwendet werden. Sie können es auch in der Nähe des TV-Lautsprechers platzieren und verwenden es unterstützend zum Fernsehen.

| | |
|------------|-----------------|
| Kabellänge | 5 m |
| Anschluss | 2,5 mm Stereo |
| Mikrofon | Omnidirektional |
| Gewicht | 35 g |
| Farbe | Schwarz |



Kabel Kit

BE9126

Beschreibung

Verwenden Sie das Kabel-Kit, um Ihren Sprachverstärker an Ihren Fernseher oder Hi-Fi-System anzuschließen und genießen Sie hohe Klangqualität in Stereo. Das Kit enthält ein 5 Meter Stereo-Kabel und einen Stereo-Cinch-Adapter.

| | |
|-------------------|------------------------|
| Kabellänge | 5 m |
| Kabel-Anschluss | 2,5 zu 3,5 mm Stereo |
| Adapterlänge | 25 cm |
| Adapter Anschluss | 3,5 mm Stereo zu Cinch |
| Farbe | Schwarz |



Kopfhörer

BE9122

Beschreibung

Der Stereo-Kopfhörer verfügt über eine halbgeschlossene Kapsel und liefert klaren Sound mit minimaler Rückkopplung. Er hat einen hervorragenden Klang, ist sehr robust und benutzerfreundlich.

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Frequenzbreite | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedanz | 32 Ω \pm 10% |
| Empfindlichkeit | 113 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo Klinke |
| Kabellänge | 1,2 m |



Einsteckhörer

BE9124

Beschreibung

Der Stereo Einsteckhörer ist leicht und bietet klaren Sound mit viel Detail. Er ist geschlossen, mit minimalen Klangverlust und bietet große Ausgrenzung von Außengeräuschen.

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Frequenzbreite | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedanz | 16 Ω \pm 10% |
| Empfindlichkeit | 104 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo Klinke |
| Kabellänge | 1,2 m |



Stethoclip

BE9125

Beschreibung

Der Stethoclip ist speziell für unsere Hörverstärker ausgewählt und in der Lage einen Schallpegel in Mono von bis zu 140dB zu erreichen. Er ist bequem, leicht und sehr einfach auf- und abzusetzen

| | |
|------------------|--------------------------|
| Frequenzbreite | 800 Hz - 3000 kHz |
| Ausgangsleistung | 124 dB SPL @ 1kHz, 50 mW |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo Klinke |
| Gewicht | 38 g |
| Kabellänge | 1,5 m |



Reise-Etui

BE9147

Beschreibung

Das Reise-Etui ist speziell für unsere Hörverstärker ausgelegt. Es ist aus strapazierfähigem, schwarzem Canvas Stoff, mit einem verstärkten Deckel, der effizient Ihr Zubehör während der Reise schützt.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Robustes Canvas | Widerstandsfähig |
| Verstärkter Deckel | Schützt Ihre Produkte |
| Magnetverschluss | Leicht zu öffnen/schließen |
| Farbe | Schwarz |
| Größe und Gewicht | 19 x 15 x 5 cm, 240 g |





Unsere Passion ist das Hören

Reha-Com-Tech Hörlösungen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität für Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Unsere Mitarbeiter und Partner haben sich dieser Mission gewidmet. Wir arbeiten eng mit Hörgeräteakustikern und führenden Experten daran, besseres Hören für jeden zu ermöglichen.



Reha-Com-Tech
Schönbornstraße 1
54295 Trier
Fon: 0651-99 45 680
Fax: 0651-99 45 681
Mail: info@reha-com-tech.de
www.reha-com-tech.de