

Presentación del análisis presuntivo de drogas NARK®

Análisis presuntivo de drogas NARK®

REACTIVO PARA CANNABINOIDES SINTÉTICOS

Se han dedicado muchas horas al desarrollo de una prueba presuntiva de cannabinoides sintéticos para aplicaciones de campo que cumpla con los requisitos NIJ. Esta solución identifica únicamente las "formulaciones basadas en indoles" de cannabinoides sintéticos en un proceso de 2 pasos. Afortunadamente, las fórmulas de los indoles representan más del 75% de las sustancias conocidas e incluyen las sustancias JWH-018, JWH-073, JWH-200, AB-001, AM-2201, RCS-4, RCS-8, XLR-11 y UR-144. Esta prueba no cambia de color con formulaciones sin indoles tales como HU-210, CP47,496 u otras nuevas sustancias AKB-48 pero, por suerte, éstas son menos comunes y las sustancias más conocidas incluyen varios cannabinoides sintéticos.



REACTIVO PARA METILENDIOXIPIROVALERONA

La metilendioxipirovalerona (MDPV) es un estimulante sintético conocido como una sustancia del Anexo I. Esta prueba de campo específica identificará presuntamente sustancias tales como MDPV, Butylone, Ethylone, Metilona, Naphyrone y Pentylone. Por lo general, estos compuestos se encuentran en forma de polvo de color blanco a amarillento y se venden como productos de consumo cotidiano, como ser, sales de baño, quitamanchas, fertilizantes o limpiadores de vidrio. La configuración química actual más conocida actualmente es la forma de "sales de baño" y ésta debería ser la primera prueba de campo en realizarse.



REACTIVO PARA MEFEDRONA

La mefedrona es la segunda forma de "sal de baño" de este estimulante sintético de uso cotidiano. Esta sustancia no es tan habitual como la metilendioxipirovalerona; por lo tanto, recomendamos realizar esta prueba únicamente después de haber utilizado el reactivo para metilendioxipirovalerona y el resultado haya sido negativo. Esta prueba presuntiva de campo identificará un resultado positivo de mefedrona con un color púrpura INMEDIATO después de haber roto y agitado la tercera ampolla. Esta sustancia también se vende como un producto doméstico de uso habitual y se encuentra en sales de baño, quitamanchas, fertilizantes y limpiadores de vidrio.



REACTIVO A-PVP

El a-PVP es la tercera forma de "sal de baño" de los estimulantes sintéticos. Esta prueba presuntiva de campo consta de tres (3) pasos con cambio de color para un resultado positivo. Esta sustancia se vende como producto para uso doméstico, paquetes con a-PVP, como otras "sales de baño", con la frase "No indicado para consumo humano" en el frente del envase.



REACTIVO 2C

En los continuos esfuerzos de Sirchie por tratar la apariencia siempre cambiante de las drogas que se utilizan en este país, tenemos el agrado de presentar el reactivo 2C, lo último en un nuevo grupo de sustancias sintéticas que se distribuyen internamente.

En julio de 2012 se promulgó la Ley para la prevención del uso indebido de drogas sintéticas, entre las cuales se incluía las sustancias 2C-E y 2C-I (sonrisas). Todos los productos 2C son psicodélicos basados en una combinación de MDMA y LSD que conduce a estados imaginativos extremadamente intensos y prolongados.



NÚM.	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	PRUEBA PRESUNTIVA PARA	PRECIO
NARK20023	23	¡NUEVO! Reactivo de cannabinoides sintéticos, 5 por caja	Cannabinoides sintéticos (indoles únicamente)	
NARK20024	24	¡NUEVO! Reactivo MDPV, 10 por caja	MDPV (Cathinones sintéticos)	
NARK20025	25	¡NUEVO! Reactivo de mefedrona, 10 por caja	Mefedrona (Cathinones sintéticos)	
NARK20026	26	¡NUEVO! Reactivo a-PVP, 10 por caja	a-PVP (Cathinones sintéticos)	
NARK20029	29	¡NUEVO! Reactivo 2C, 10 por caja	2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T-7	

Por el momento, la policía conoce nuestros equipos de prueba estándar para la mayoría de las drogas ilegales como ser marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina. En los últimos dos años, Sirchie estuvo investigando y desarrollando productos para luchar contra el problema cada vez mayor de los cathinones y cannabinoides sintéticos que influyen negativamente en las comunidades. Tenemos el agrado de presentarles todo un conjunto de soluciones para la realización de pruebas ante la sospecha de estas sustancias.


¡OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN!

Ofrecemos un curso de entrenamiento de 4 horas de duración con certificación y un curso de 6 horas con instructor en el uso de nuestras pruebas presuntivas de droga para aplicaciones de campo. Ambos cursos se dictan en el establecimiento del cliente.



Para obtener más información, consulte la Sección de Entrenamiento de este catálogo.

TRES PASOS PROGRESIVOS:

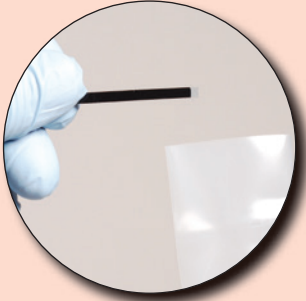

Después de quitar el gancho, coloque una pequeña cantidad de la sustancia sospechosa en la bolsa para pruebas.



Rompa las ampollas de izquierda a derecha y agite.



Analice los colores obtenidos.

BOLSAS PARA PRUEBAS PRESUNTIVAS DE DROGAS NARK® II

Las bolsas identificadoras de droga NARK® II tienen la capacidad de identificar presuntamente varias familias de sustancias sospechadas de ser drogas adictivas. Diseñadas para funcionar con un laboratorio de narcóticos portátil, las bolsas NARK® II están preparadas para ser usadas en cualquier momento que fuera necesario. Cada una de las pruebas contiene uno o más reactivos químicos. Cuando una secuencia de prueba específica arroja un color o serie de colores previsible, es posible presumir una confirmación positiva.

En general, nuestro sistema legal reconoce a la identificación presuntiva como un componente de causa probable. No existe un sistema de identificación de drogas actualmente en uso que elimine por completo los falsos positivos y los falsos negativos. Es necesario recurrir a un laboratorio forense para identificar de manera cualitativa y cuantitativa una sustancia desconocida.



COMPRE
POR
INTERNET



www.sirchie.com

Bolsas con reactivos para pruebas de drogas NARK® II

Análisis presuntivo de drogas NARK®



NARK® II identifica presuntivamente los siguientes grupos de drogas:

- Cannabis sativa L.
- Depresores
- Alucinógenos
- Narcóticos
- Estimulantes
- Sintéticos

El sistema progresivo de identificación de drogas NARK® II permite realizar una prueba de las siguientes sustancias:


- 2C (Cathinones sintéticos)
- a-PVP (Cathinones sintéticos)
- Anfetaminas
- Barbitúricos
- Benactizina
- Cannabis (Marihuana)
- Cocaína
- Codeína
- Dimetiltryptamina
- Efedrina
- Fentanilo
- GHB
- Heroína
- Ketamina
- LSD
- MDA
- MDMA (Éxtasis)
- MDPV (Cathinones sintéticos)
- Mefedrona (Cathinones sintéticos)
- Mescalina
- Metadona
- Metanfetamina
- Metacualona
- Metcatinona
- Metedrina
- MMDA
- Mollies
- Morfina
- Oxycodona
- PCP
- Psicobina (hongos psicodélicos)
- Rohypnol
- Talwin
- Valium

COMPONENTES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS NARK® II



NÚM.	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	PRUEBA PRESUNTIVA PARA	PRECIO
NARK2001	01	Reactivo de Marquis, 10 por caja.	Alcaloides del opio	
NARK2002	02	Reactivo de ácido nítrico, 10 por caja	Diferenciar heroína/morfina	
NARK2003	03	Dille-Koppanyi, 10 por caja	Barbitúricos	
NARK2004	04	Reactivo de Ehrlich, 10 por caja	LSD	
NARK2005	05	Duquenois-Levine, 10 por caja	Marihuana, hachís, aceite de hachís, THC	
NARK2007	07	Reactivo de Scott (modificado), 10 por caja	Sales de cocaína, base de cocaína	
NARK2008	08	Metadona, 10 por caja	Metadona	
NARK2009	09	PCP, Metacualona, 10 por caja	PCP y metacualona	
NARK20010	10	Opiáceos especiales, 10 por caja,	Codeína, heroína, morfina Oxicodona, Fentanilo, Buprenorphine	
NARK20011	11	Reactivo modificado de Mecke, 10 por caja	Toda heroína	
NARK20012	12	Talwin (Pentazocina), 10 por caja	Talwin	
NARK20013	13	Efedrina, 10 por caja	Efedrina, Pseudoefedrina	
NARK20014	14	Valium, Rohypnol, Ketamina, 10 por caja	Valium, Rohypnol, Ketamina	
NARK20015	15	Reactivo de nitroprusiato de sodio, 10 por caja	Metanfetamina y MDMA	
NARK20019	19	Reactivo de Mayer, 10 por caja	Alcaloides narcóticos	
NARK20020	20	Reactivo KN, 10 por caja	Marihuana (planta y semillas)	
NARK20021	21	Reactivo GHB, 5 por caja	GHB	
NARK20022	22	Reactivo de Mandelin	Metadona	
NARK20023	23	¡NUEVO! Reactivo de cannabinoides sintéticos, 5 por caja	Cannabinoides sintéticos (indoles únicamente)	
NARK20024	24	¡NUEVO! Reactivo MDPV, 10 por caja	MDPV (Cathinones sintéticos)	
NARK20025	25	¡NUEVO! Reactivo de mefedrona, 10 por caja	Mefedrona (Cathinones sintéticos)	
NARK20026	26	¡NUEVO! Reactivo a-PVP, 10 por caja	a-PVP (Cathinones sintéticos)	
NARK20029	29	¡NUEVO! Reactivo 2C, 10 por caja	2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T-7	
NARK20030	30	¡NUEVO! Reactivo psilocibina/psilocina, 10 por caja	Psilocibina/psilocina (hongos)	
NARK20031	31	¡NUEVO! Reactivo de Liebermann, 10 por caja	Metanfetamina, Morfina	

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DE ACCESORIO	PRECIO
NARK200N	Polvo neutralizador de ácido, 59 ml (2 oz), 10 unidades	
NARK2006	Líquido neutralizador de ácido, frasco de 30 ml (1 oz)	
NARK20016	Tarjeta de identificación progresiva, 21,59 cm x 35,56 cm (8 1/2" x 14")	
NARK20017	Gráfico para pared para identificación progresiva, 71,12 cm x 91,44 cm (28" x 36")	
NARK20018	Registro de resultados de pruebas de campo de drogas, cuaderno de 25 hojas	

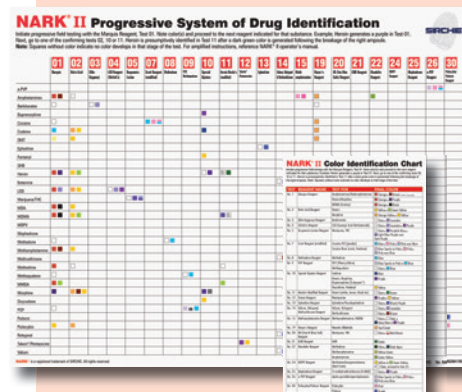

Los gráficos de identificación progresiva NARK® II están disponibles en formatos de 21,6 cm x 35,5 cm (8 1/2" x 14") y 71 cm x 91 cm (28" x 36").

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK200MK:

- 20- NARK2001-1 Reactivo de Marquis (Alcaloides del opio)
- 10- NARK2002-1 Reactivo de ácido nítrico (Heroína/morfina)
- 10- NARK2003-1 Reactivo de Dille-Koppanyi (Barbitúricos)
- 10- NARK2004-1 Reactivo de Ehrlich (LSD)
- 20- NARK2005-1 Reactivo de Duquenois-Levine (Marihuana, hachís, aceite de hachís, THC)
- 10- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crack)
- 10- NARK2008-1 Reactivo de metadona
- 10- NARK20010-1 Reactivo de opiáceos especiales (Fentanilo, heroína, oxycodona)
- 10- NARK20011-1 Reactivo de Mecke (Toda heroína)
- 10- NARK20012 -1 Talwin (Pentazocina), reactivo
- 10- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina, MDMA)
- 1- NARK2006 Neutralizador de ácido, 30 ml (1 oz)
- 1- KCP1002 Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 32,22 cm x 22,7 cm x 9,2 cm (12,688" x 8,938" x 3,625"). Peso: 2.290 g (5,05 lb)

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK200IK:

- 10- NARK2001-1 Reactivo de Marquis (Alcaloides del opio)
- 10- NARK2002-1 Reactivo de ácido nítrico (Heroína/morfina)
- 10- NARK2003-1 Reactivo de Dille-Koppanyi (Barbitúricos)
- 10- NARK2004-1 Reactivo de Ehrlich (LSD)
- 10- NARK2005-1 Reactivo de Duquenois-Levine (Marihuana, hachís, aceite de hachís, THC)
- 10- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crack)
- 10- NARK2008-1 Reactivo de metadona
- 10- NARK20010-1 Reactivo de opiáceos especiales (Fentanilo, heroína, oxycodona)
- 10- NARK20011-1 Reactivo de Mecke (Toda heroína)
- 10- NARK20012-1 Talwin (Pentazocina), reactivo
- 10- NARK20013-1 Reactivo de efedrina (Efedrina, pseudoefedrina)
- 10- NARK20014-1 Valium, Rohypnol, Ketamina, Reactivo
- 10- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina, MDMA)
- 1- NARK2006 Neutralizador de ácido, 30 ml (1 oz)
- 1- KCP1002 Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 32,22 cm x 22,7 cm x 9,2 cm (12,688" x 8,938" x 3,625"). Peso: 2.358 g (5,2 lb)

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK200PK:

- 2- NARK2001-1 Reactivo de Marquis (Alcaloides del opio)
- 2- NARK2002-1 Reactivo de ácido nítrico (Heroína/morfina)
- 2- NARK2003-1 Reactivo de Dille-Koppanyi (Barbitúricos)
- 2- NARK2004-1 Reactivo de Ehrlich (LSD)
- 2- NARK2005-1 Reactivo de Duquenois-Levine (Marihuana, hachís, aceite de hachís, THC)
- 2- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crack)
- 2- NARK20011-1 Reactivo de Mecke (Toda heroína)
- 2- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina, MDMA)
- 1- NARK2006 Neutralizador de ácido, 30 ml (1 oz)
- 1- Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"). Peso: 657 g (1,45 lb)

EQUIPOS PARA PRUEBAS PRESUNTIVAS DE DROGAS NARK® II

SIRCHIE® ofrece variadas combinaciones de equipos de campo NARK® II en estuches de plástico resistente con 16 a 130 pruebas individuales. Cada uno de nuestros equipos NARK® II incluye un gráfico de colores progresivos e instrucciones.

También contamos con equipos personalizados. Comuníquese con el Departamento de Ventas de productos NARK® de SIRCHIE al (800) 356-7311 para obtener más información y solicitar un presupuesto.



CONTENIDO DEL EQUIPO NARK200CD:

- 10- NARK2001-1 Reactivo de Marquis (Alcaloides del opio)
- 10- NARK2004-1 Reactivo de Ehrlich (LSD)
- 10- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crack)
- 10- NARK20010-1 Reactivo de opiáceos especiales (Fentanilo, heroína, oxycodona)
- 10- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina, MDMA)
- 1- NARK2006 Neutralizador de ácido, 30 ml (1 oz)
- 1- KCP1000 Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"). Peso: 907 g (2 lb)

CONTENIDO DEL EQUIPO NARK200MEG:

- 10- NARK2001-1 Reactivo de Marquis (Alcaloides del opio)
- 10- NARK2004-1 Reactivo de Ehrlich (LSD)
- 10- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crack)
- 10- NARK20011-1 Reactivo de Mecke (Toda heroína)
- 10- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina, MDMA)
- 1- NARK2006 Neutralizador de ácido, 30 ml (1 oz)
- 1- KCP1001 Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"). Peso: 907 g (2 lb)

NÚM. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NARK200MK	Equipo maestro, 130 pruebas más neutralizador 2 cajas prueba 01, 05; 1 caja 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 15
NARK200IK	Equipo internacional, 130 pruebas más neutralizador 1 caja c/u 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NARK200CD	Equipo Customs/Douanes, 50 pruebas más neutralizador, 1 caja c/u prueba 01, 04, 07, 10, 15
NARK200MEG	Equipo Meg, 50 pruebas más neutralizador, 1 caja c/u prueba 01, 04, 07, 11, 15
NARK200PK	Equipo Port-A-Kit, 16 pruebas más neutralizador, 2 bolsos c/u prueba 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 15



PRECIO

Equipos para pruebas de drogas NARK® II

Análisis presuntivo de drogas NARK®

EQUIPOS NARK® II EN FORMA DE CARPETA Y PARA PATRULLAS

Los equipos de narcóticos en forma de carpeta fueron diseñados especialmente para las agencias que necesitan una forma práctica de incorporar los equipos de pruebas presuntivas en las aplicaciones de campo. En lugar de llevar las pruebas sueltas y correr el riesgo de romperlas accidentalmente, este equipo de plástico negro duro con insertos de espuma tiene capacidad para 12 o 24 pruebas individuales. La tapa, en su lado interno, tiene un cuadro de colores con las reacciones correctas. Este equipo incluye las pruebas más comunes que se utilizan para identificar de modo presuntivo las drogas ilegales.

El equipo NARK® II para patrullas incluye los 3 reactivos más frecuentemente utilizados por los agentes policiales durante un análisis presuntivo de drogas: 4 pruebas de cocaína, 2 de metanfetamina y 2 de marihuana.

Equipo No. NARK12PAK en forma de carpeta.



Equipo para patrullas No. NARK200VC.



Los equipos en forma de carpeta y para patrullas son portátiles gracias al tamaño compacto del maletín.



CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK12PAK:

- 2- NARK2001-1 Reactivo de Marquis, bolsas para pruebas
- 2- NARK2005-1 Reactivo de Duquenois-Levine (Marihuana), bolsas para pruebas
- 4- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crac), bolsas para pruebas
- 2- NARK20011-1 Reactivo modificado de Mecke (Toda heroína), bolsas para pruebas
- 2- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina/MDMA), bolsas para pruebas
- 1- NARK12PAK Maletín de copolímero, negro. Dimensiones: 31,7 cm x 26 cm x 3,2 cm (12,5" x 10,25" x 1,25"); Peso: 658 g (1,45 lb)

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK24PAK:

- 4- NARK2001-1 Reactivo de Marquis, bolsas para pruebas
- 6- NARK2005-1 Reactivo de Duquenois-Levine (Marihuana), bolsas para pruebas
- 6- NARK2007-1 Reactivo de Scott modificado (Cocaína, HCl, crac), bolsas para pruebas
- 4- NARK20011-1 Reactivo modificado de Mecke (Toda heroína), bolsas para pruebas
- 4- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio (Metanfetamina/MDMA), bolsas para pruebas
- 1- NARK12PAK Maletín de copolímero, negro. Dimensiones: 31,7 cm x 26 cm x 3,2 cm (12,5" x 10,25" x 1,25"); Peso: 703 g (1,55 lb)

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK200VC:

- 2- NARK2005-1 Prueba de Duquenois-Levine para marihuana, hachís, aceite de hachís, THC
- 4- NARK2007-1 Prueba - reactivo de Scott (modificado) para sales de cocaína, base de cocaína
- 2- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio, prueba para metanfetamina/MDMA
- 1- NARK200VCC Maletín compacto para traslado con inserto de espuma. Dimensiones: 22,5 cm x 14 cm x 3,18 cm (8,875" x 5,5" x 1,25"); Peso: 200 g (5,8 oz)

COMPRE POR INTERNET 
www.sirchie.com

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NARK12PAK	NARK® II Equipo de 12 paquetes en forma de carpeta	
NARK24PAK	NARK® II Equipo de 24 paquetes en forma de carpeta	
NARK200VC	NARK® II Equipo para patrullas	

Análisis presuntivo de drogas NARK®

CONTENIDO DEL EQUIPO

NARK200BK:

- 2- NARK2005-1 Prueba de Duquenois-Levine para marihuana, hachís, aceite de hachís, THC
- 2- NARK2007-1 Reactivo de Scott (modificado), prueba para sales de cocaína, base de cocaína
- 2- NARK20015-1 Reactivo de nitroprusiato de sodio, prueba para metanfetamina/MDMA
- 1- NARK200AN Neutralizador de ácido, 15 g (0,5 oz)
- 1- KCP306 Maletín de plástico moldeado con inserto de espuma para cinturón. Dimensiones: 5,7 cm x 10,8 cm x 10,2 cm (2,25" x 4,25" x 4")

Toallas descartables identificadoras de cocaína y equipos para pruebas de droga NARK® II

EQUIPO DE ANÁLISIS DE NARCÓTICOS PARA CINTURÓN

Este equipo portátil para el análisis de narcóticos se lleva directamente en el cinturón para tener las pruebas siempre a mano. El equipo incluye 2 pruebas para marihuana, cocaína y metanfetamina y una bolsa de 14 g (0,5 oz) con neutralizador de ácido.




NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NARK200BK	Equipo para análisis de narcóticos, para cinturón	

CÓMO USAR LAS TOALLAS DESCARTABLES IDENTIFICADORAS DE COCAÍNA:



Extraiga la toalla descartable identificadora de cocaína del sobre.

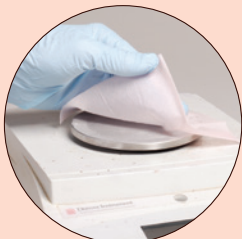

Limpie la superficie sospechosa con la toalla descartable identificadora de cocaína.



Si la toalla se vuelve azul, se puede presumir la presencia de cocaína.

TOALLAS DESCARTABLES IDENTIFICADORAS DE COCAÍNA NARK® II

Estas prácticas toallas descartables identificadoras de cocaína identifican presuntamente la cocaína a partir de rastros de residuos presentes en las superficies que han estado en contacto con la sustancia. Estas toallas de 13 cm x 15 cm (5" x 6") son fáciles de usar y ofrecen un resultado inmediato. Simplemente limpie la superficie sospechosa con las toallas descartables identificadoras de cocaína y, si la superficie ha estado en contacto con cocaína, la toalla cambiará inmediatamente a azul. Son ideales para ser usadas por los agentes de narcóticos en aplicaciones de campo y por investigadores en la escena del crimen.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NS20150	NARK® II Toallas descartables identificadoras de cocaína, 1 caja de 50 toallas	
NS20150	Descuento por volumen al ordenar 6 cajas (300 toallas descartables) o más.	

Equipos para pruebas de drogas NARK®


Análisis presuntivo de drogas NARK®

EQUIPO DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE NARCÓTICOS (NARK®)


El equipo NARK® es un equipo de prueba de campo que permite analizar las drogas y los narcóticos prohibidos de uso más frecuente. Los reactivos están envasados en tubos pequeños, un sistema único y de fácil manejo. Cada reactivo individual está sellado en una delgada ampolla de vidrio para garantizar la frescura y eliminar la contaminación cruzada con otros reactivos. Las ampollas de vidrio están sujetas en cada extremo del tubo de plástico. El equipo incluye una cantidad suficiente de reactivos como para realizar 80 pruebas individuales de variadas drogas.



TRES PASOS PROGRESIVOS:

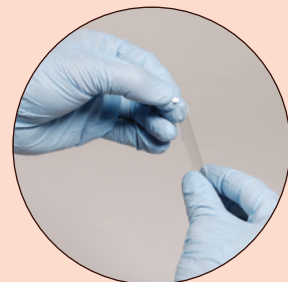

1. Quite la tapa del tubo correspondiente y agregue una pequeña cantidad de la sustancia sospechosa.

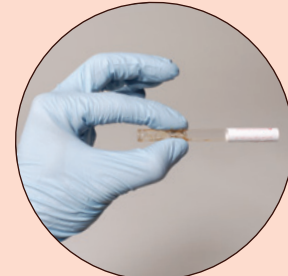

2. Cierre el tubo y rompa la(s) ampolla(s) ejerciendo una leve presión entre el pulgar y el índice.



3. Agite suavemente, luego compare la reacción con el cuadro de colores provisto junto con el equipo.



El equipo NARK® es un equipo práctico y compacto para pruebas de campo que permite identificar presuntamente la mayoría de las drogas y los narcóticos prohibidos de uso más frecuente:

- Marihuana
- GHB
- Hachís
- THC
- Cocaína
- Crac/Pasta base
- Anfetaminas
- Barbitúricos
- Alcaloides narcóticos
- Alcaloides del opio
- PCP
- Alucinógenos
- Heroína
- Morfina

Utilice el cuadro de colores provisto para verificar las reacciones positivas de color en la identificación presuntiva de sustancias sospechosas que se están analizando.

CONTENIDO DEL EQUIPO NAR100:

- 1- NAR10001 Reactivo de Mayer para alcaloides narcóticos, 10 unidades
- 1- NAR10002 Reactivo de Marquis para alcaloides del opio, Anfetaminas/Metanfetamina, 10 unidades
- 1- NAR10003 Reactivo de ácido nítrico para diferenciar entre heroína y morfina, 10 unidades
- 1- NAR10004 Reactivo tiocianato de cobalto para cocaína, crac, 10 unidades
- 1- NAR10005 Reactivo de Dille-Koppanyi para barbitúricos, 10 unidades
- 1- NAR10006 Reactivo de Mandelin para amfetaminas, 10 unidades
- 1- NAR10007 Reactivo de Ehrlich para LSD, 10 unidades
- 1- NAR10008 Reactivo de Duquenois para marihuana, hachís y THC, 10 unidades
- 1- NAR10010 Bolsas de plástico, 10 unidades
- 1- NAR10011 Neutralizador de ácido
- 1- KCP1000 Maletín de copolímero plástico negro para traslado. Dimensiones: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"); Peso: 771 g (1,7 lb)

NÚM. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PRECIO

NAR100 Equipo de reactivos para análisis de narcóticos





Reacción de color positiva de marihuana con reactivo NAR10009 KN.

COMPONENTES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS NARK®



NÚM.	PRUEBA DESCRIPCIÓN	PRUEBA PRESUNTIVA PARA PRECIO
NAR10001	01 Reactivo de Mayers, 10 por caja	Alcaloides narcóticos
NAR10002	02 Reactivo de Marquis, 10 por caja	Alcaloides narcóticos
NAR10003	03 Reactivo de ácido nítrico, 10 por caja	Diferenciar heroína/morfina
NAR10004	04 Reactivo tiocianato de cobalto, 10 por caja	Cocaína, Crac
NAR10005	05 Reactivo de Dille-Koppanyi, 10 por caja	Barbitúricos
NAR10006	06 Reactivo de Mandelin, 10 por caja	Anfetaminas
NAR10007	07 Reactivo de Ehrlich, 10 por caja	LSD
NAR10008	08 Reactivo de Duquenois, 10 por caja	Marihuana, hachís, THC
NAR10009	09 Reactivo KN, 10 por caja	Marihuana (planta y semillas)
NAR10013	13 Tiocianato de cobalto modificado, 10 por caja	Fumar cocaína, crac
NAR10014	14 Valium, Rohypnol, Ketamina, 10 por caja	Valium, Rohypnol y Ketamina
NAR10015	15 Reactivo de nitroprusiato de sodio, 10 por caja	Metanfetamina y MDMA
NAR10016	16 Reactivo modificado de Mecke, 10 por caja	Toda heroína
NAR10018	18 Talwin® (Pentazocina), 10 por caja	Talwin y pentazocina
NAR10019	19 Efedrina, 10 por caja	Efedrina, Pseudoefedrina
NAR10022	22 Opiáceos especiales, 10 por caja,	Codeína, heroína y oxiconona
NAR10024	24 iNUEVO! Reactivo MDPV, 10 por caja	MDPV (Cathinones sintéticos)
NAR10025	25 iNUEVO! Reactivo de mefedrona, 10 por caja	Mefedrona (Cathinones sintéticos)
NAR10028	28 Reactivo GHB, 5 por caja	GHB
NAR10029	29 PCP, Metacualona, 10 por caja	PCP y metacualona
NAR10030	30 iNUEVO! Psilocibina/psilocina, 10 por caja	Psilocibina/psilocina (hongos)

CONTENIDO DE LA PRUEBA INDIVIDUAL NO. MZ020A:

- 1- 131LT1 Sellador de plancha (Levantador doble), transparente, 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 1- KCP171 Gotero de vidrio para retención de muestra, 8,85 cc
- 1- KCP191 Pipeta con capilar, 20 microlitros
- 1- KCP174 Planchas para cromatografía, capa delgada, 5 cm x 10 cm
- 1- KRL108 Reactivo móvil No. 2, gotero de 11 ml
- 1- MZ020CAP Cromatografía de capa delgada de marihuana, cápsulas en color

CONTENIDO DEL EQUIPO NO. MZ020:

- 6- MZ020A Equipo de cromatografía de capa delgada
- 1- MZ010B Reactivo de extracción #1, 30 ml (1 oz)
- 1- KCP228A Frasco de vidrio con tapa, 118 ml (4 oz) Rotulada Mobile Phase... (Fase móvil)
- 1- KCP228B Frasco de vidrio con tapa, 118 ml (4 oz) Rotulada Color Developing... (Color en proceso de revelado)
- 1- 288DP Pipetas descartables con capilar y válvula de 3 ml
- 1- EIL011 Etiquetas para identificación de evidencia, "Evidencia del crimen"
- 1- KCP321 Foto: Cromatografía de comparación de marihuana
- 1- KCP1391 Tenazas de plástico, 12,1 cm (4,75")
- 1- KCP165 Varilla mezcladora de vidrio, 12,7 cm (5")
- 1- KCP154 Pipeta con válvula de succión
- 1- MZ020C Maletín de plástico moldeado, texturizado, para traslado. Dimensiones: 36,2 cm x 20,9 cm x 17,8 cm (14,25" x 8,25" x 7"); Peso: 1,47 kg (3,25 lb)

NÚM.	DESCRIPCIÓN DE ACCESORIO	PRECIO
NAR10010	Bolsas de plástico, 10 por caja	
NAR10011	Neutralizador de ácido, frasco de 30 ml (1 oz)	
NAR10012	Maletín de polietileno, 21,6 cm x 17,78 cm x 7,94 cm (8 1/2" x 7" x 3 1/8")	
NAR10020	Gráfico NARK®	

CROMATOGRAFÍA DE CAPA DELGADA DE MARIHUANA

Esta prueba rápida, sencilla y específica de marihuana emplea una técnica de laboratorio que cualquier agente puede realizar. Sin falsos positivos, tiene una sensibilidad 120 veces mayor que la prueba de Duquenois. Se debe prestar especial atención a las muestras que anteriormente se consideraron impropias de ser analizadas. Un equipo completo de cromatografía de capa delgada que permite realizar seis pruebas individuales y completas.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MZ020	Equipo de cromatografía de capa delgada de marihuana	
MZ020A	Prueba de repuesto, 1 unidad	

