

AlkoSure K1 – Návod na použitie

AlkoSure K1 je digitálny tester na alkohol, ktorý rýchlo zmeria hladinu alkoholu vo Vašej krvi. Najmenší alkoholtester na svete s veľkým rozsahom merania vyhodnotí Vaše meranie v priebehu niekoľkých sekúnd!

Obsah balenia:

Detektor alkoholu AlkoSure K1
1ks AAA alkalická batéria
3 ks náustkov
Záručný list
Slovenský návod na obsluhu

Špecifikácia:

Typ senzora: polovodičový (Sensitive Semi-conductor Sensor)
Čas prípravy na meranie: 10 - 20 s.
Čas reakcie: 5 s.
Batéria: 1 x 1,5V AAA alkalická
Životnosť batérie: 200 meraní
Rozsah merania: 0,0 - 4,0 promile (0,0 - 0,4 % BAC)
Prevádzková teplota: +10 °C až +40 °C
Presnosť: +/- 0,1 promile (+/- 0,01 % BAC)



Príprava prístroja

Vyvinutím malého tlaku na vyznačenom mieste zložte kryt batérií. Vložte 1x AAA 1,5V alkalickú batériu a kryt vráťte na pôvodné miesto. Odporúčame používať alkalické batérie, inak je možné, že tester nebude fungovať správne.

Použitie testera:

Náustok: Vysuňte vstavaný náustok umiestnený v hornej časti alkoholtestera. V prípade viacerých používateľov na vysúvací náustok aplikujte náhradný náustok. Pre Vaše pohodlie sú v základnom balení 3 ks náustkov.

Zapnutie: Stlačte tlačidlo zapnutia a držte ho 2 sekundy. V priebehu odpočítavania na displeji sa senzor samočistí a zahrieva.

Keď po odčítaní displej zostane prázdny, prístroj zapípa a svieti červená dióda, tester je pripravený na použitie.

Fúkanie: Fúčajte rovnomerne do náustku po dobu 5 sekúnd. Dlhé pípnutie znamená, že sa vzorka dychu zbiera, počas neho je potrebné stále fúkať. Krátke pípnutie znamená, že odber vzorky je dokončený, môžete prestať vdychovať vzduch do náustku. Po analýze sa zobrazí výsledok merania.

FL: Ak sa na displeji zobrazí nápis „FL“, znamená to, že:

1/ meranie nebolo detekované: meranie nebolo vykonané do 8 sekúnd od zobrazenia „blow“ na displeji. Reštartujte prístroj a meranie zopakujte.

2/ meranie nebolo detekované: bolo vdychnuté nedostatočné množstvo vzduchu, alebo bolo fúkание príliš krátke – zopakujte meranie.

3/ zvyšky alkoholu sa zachytili na senzore – počkajte 3-5 minút a zopakujte meranie.

Systémové správy:

H – „H“ sa na displeji zobrazí, ak vdýchnete vzduch s vyššou koncentráciou alkoholu ako je 4 promile alebo fúkate do testera bezprostredne po požití alkoholu.

Er – „Er“ sa na displeji zobrazí pri trvalom poškodení senzora. Kontaktujte servisné stredisko.

Lo – „Lo“ sa na displeji zobrazí, ak je slabá batéria. Vymeňte ju.

Upozornenia:

Je dôležité počkať aspoň 20 minút po požití alkoholu, jedení a fajčení, aby ste mohli tester použiť! Inak hrozí poškodenie senzora a nesprávne vyhodnotené meranie!

Odporúčame počkať aspoň minútu medzi jednotlivými meraniami. V prípade, že výsledok posledného merania bol vysoký (0,8 promile a viac), je potrebné počkať 3-5 minút pred uskutočnením ďalšieho merania.

Ak ste tester dlhšie nepoužili, je potrebné prečistiť senzor a pripraviť ho na meranie. Tester zapnite, nechajte plynúť odpočítavanie, vypnite ho. Zopakujte 2-3 krát.

Aby ste sa na tester mohli spoľahnúť a aby ste predĺžili jeho životnosť, je potrebné ho každých 6 mesiacov kalibrovať.

Tester meria v jednotke % BAC. Jednoduchý prevod na promile – posun o 1 desatinné miesto doprava. Príklad:

0,01 %BAC = 0,1 promile

0,2 % BAC = 2 promile

0,17 % BAC = 1,7 promile

Záruka:

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na iné vzniknuté straty (ušlý zisk atď.).

S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
- závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení)
- závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva
- závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja
- prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu
- poškodenie počas transportu alebo nesprávnym skladovaním
- prirodzené opotrebenie senzora
- nutnosť kalibrácie prístroja (senzora)

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: 032 / 38 10 075

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je potrebné predložiť záručný list a sprievodný list s popisom závady / požiadavky spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom!

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním senzora. Kalibrácia prístroja alebo výmena senzora sa nepovažujú za záručnú opravu. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady spôsobené vydychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu a pri fajčení).