


KURZANLEITUNG

VIRTUOSO Serie 2

Matratzen-Ersatzsystem




SCU (BEDIENEINHEIT)

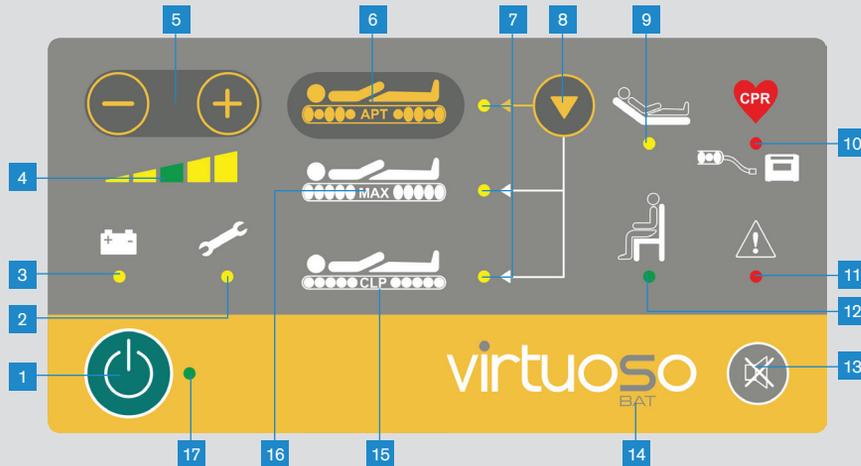


1. GO-Button
2. Service-Anzeige
3. Anzeige Akku-Ladestatus
4. Anzeige der Druckstärke
5. Druckeinstellung
6. Wechseldrucktherapie
7. Anzeige des aktiven Modus
8. Modus-Auswahltaete
9. Status Rückenlehne
10. CPR/ Luftanschluss offen
11. Störungsanzeige
12. Sitzmodus
13. Ton aus
14. Mit Akku ausgestattet (BAT)
15. Konstanter Niedrigdruck
16. Maximaler Druck
17. Anzeige Stromversorgung (BAT)

MATRATZE MIT DER BEDIENEINHEIT VERBINDEN

Verbinden Sie die Matratze wie folgt mit der Bedieneinheit:

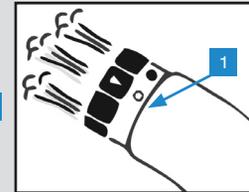

- Der Luftanschluss muss im geöffneten Modus sein (1).
- Führen Sie den Stecker in einem Winkel von ca. 45° in die Anschlussbuchse und drücken Sie diesen herunter, bis er hörbar einrastet (2).
- Schließen Sie den Rückenlehnsensor an (3).
- Um die CPR-Funktion zu aktivieren ziehen Sie den Schlauch aus der Anschlussbuchse.

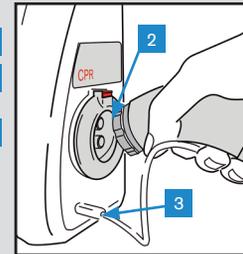


VIRTUOSO Serie 2

Matratzen-Ersatzsystem



THERAPIEMODI

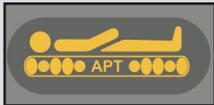

Wechseldrucktherapie

Die Wechseldrucktherapie simuliert die natürliche Bewegung eines Patienten und hilft so Druckgeschwüren vorzubeugen. Die Zellen füllen und leeren sich im 7,5-Minuten-Zyklus und simulieren damit die normale Reaktion des Körpers auf Druck für einen natürlichen Schutz.



Maximale Füllung


Dieser Modus bietet eine feste und stabile Unterlage bei der Pflege des Patienten. Nach 30 Minuten schaltet sich der Wechseldruckmodus automatisch wieder ein, um Druckgeschwüre zu vermeiden.



Konstanter Niedrigdruck

Dieser Modus hält automatisch den ausgewählten Druck aufrecht, ungeachtet von Änderungen von Patientengewicht oder -position.

Therapiemodus auswählen

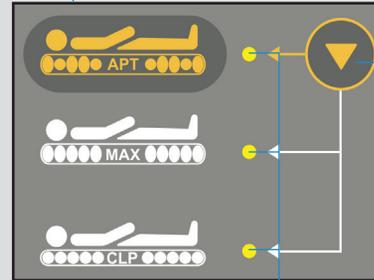

Wählen Sie den Modus wie folgt:

- Aktivieren Sie die Bedienfelder durch Drücken des GO-Buttons.
- Drücken Sie die Modus-Auswahltaste (1) solange bis der gewünschte Modus (2) gelb blinkt.
- Wenn der voreingestellte Druck erreicht ist leuchtet die Anzeige kontinuierlich gelb (2).

Druckstärke auswählen



Die Druckkontrolle ermöglicht es dem Pflegepersonal den Druck in einem Voreinstellungsbereich zwischen Wechseldrucktherapie und konstantem Niedrigdruck zu wählen.

Druck anpassen:

- Drücken Sie - um den Druck zu verringern
- Drücken Sie + um den Druck zu erhöhen

Gebrauchsanweisung beachten!

Die angegebenen Gewichtsstufen sind lediglich Empfehlungen. Welche Druckstärke für den Patienten am besten geeignet ist, hängt vom Gewicht, der Gewichtsverteilung und persönlichem Befinden ab.